

Midlertidig basalfunktion

Tandem t:slim X2

Denne kvik-guide med instruktionerne nedenfor er et referenceværktøj til behandlere, der allerede er bekendt med brugen af en insulinpumpe og med insulinbehandling generelt. Bemærk, at ikke alle skærbilleder vises. For mere detaljerede oplysninger henvises til Tandem t: slim X2 brugermanual.




Klik på **INDSTILLINGER**.




Klik på **Midl. Basal**.



Klik på **Midl. Basal**.

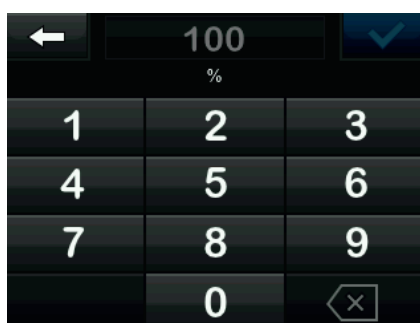

Anvend skærmens tastatur for at indtaste den ønskede procent. Klik på for at gå videre.

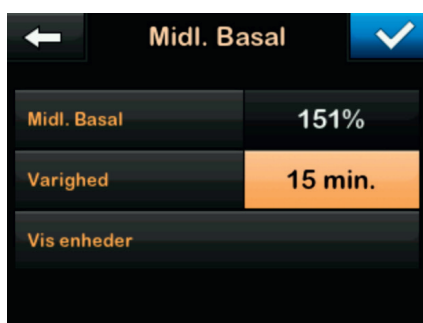

Klik på **Varighed** og anvend tastaturet for at indtaste den ønskede tidsperiode og derefter på for at gå videre.



Kontroller programmeringen og klik på for at starte.



Når du ser "splash-symbolet" er den **Midl. Basal** startet.



Den låste skærm viser nu et orange **T** ved siden af indikatoren for insulinniveauet for at indikere en aktiv Midl. Basal. OBS: hvis Midl. Basal sættes til 0%, vises ikonet **T** i rødt.



OBS: For at afbryde en pågående Midl. Basal, klik på **INDSTILLINGER** og klik på . En bekræftelsesskærm åbnes, klik på .