


Bolus

Tandem t:slim X2

Denne kvik-guide med instruktionerne nedenfor er et referenceværktøj til behandlere, der allerede er bekendt med brugen af en insulinpumpe og med insulinbehandling generelt. Bemærk, at ikke alle skærbilleder vises. For mere detaljerede oplysninger henvises til Tandem t: slim X2 brugermanual.




Klik på **0 gram** for at indtaste mængden af kulhydrat.

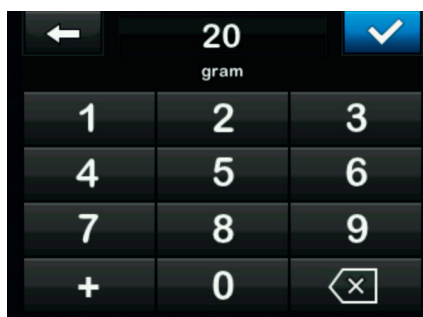

Indtast mængde KH. Sørg for, at "gram" vises over tastaturet.



Tilføj BG. Ved brug af CGM overføres den aktuelle sensorværdi.

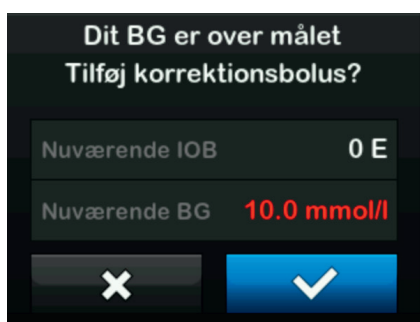

Hvis der anvendes en BG, der er over BG-målet, tilbydes det at tilføje en korrektionsdel til bolusdosen. Tryk for at acceptere.



Tryk på for at bekræfte mængden af insulin.



Bekræft forslaget ved at trykke på .



Tryk på for at starte bolusdoseringen.



Når du ser "splash-symbolet" er doseringen startet.



For at afbryde en påbegyndt bolusdosis, tryk på i startskærmen. Bekræft ved at trykke på .