

Midlertidig basal

t:slim X2

Hurtigguiden nedenfor med henvisninger er et verktøy for helsepersonell som er kjent med og kan bruke en insulinpumpe og insulinbehandling. Det er ikke alle skjermbildene som vises i denne guiden. For detaljert informasjon henvises det til brukerhåndboken til t:slim X2.




Klikk på **ALTERNATIVER**.




Klikk på **Midl. basal**



Klikk på **Midl. basal**

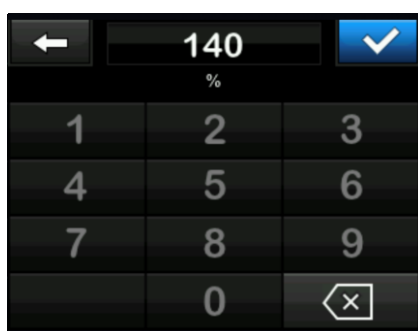

Bruk tastaturet for å angi ønsket prosent. Klikk på for å gå videre.

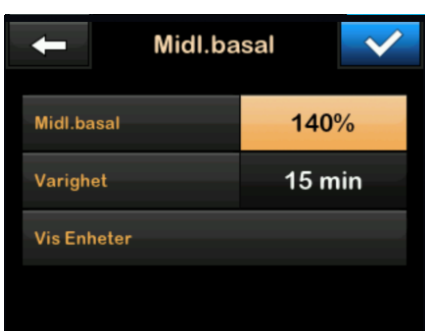


Klikk på **Varighet** og bruk tastaturet for å sette ønsket tidsperiode og så på for å gå videre.



Kontroller programmeringen och klikk på for å starte.



Når du ser "splash-symbolet" har **den midlertidige basalen** startet.

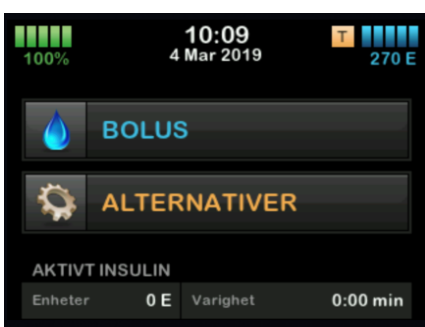

Startskjermen viser nå et orant **T** ved siden av indikatoren for insulinivå, for å indikere aktiv midlertidig basal. OBS: Hvis midl. basal settes til 0%, vises ikonet **T** i rødt.



OBS: For å avbryte en pågående midl. basal, klikk på **ALTERNATIVER** og klikk på En bekreftelses-skjerm åpnes, klikk på