

Temporär basaldos

Tandem t:slim X2


Snabbguiden med anvisningarna nedan är ett referensverktyg för vårdgivare som redan är familjära med användningen av en insulinpump och med insulinbehandling i allmänhet. Observera att alla skärmbilder inte visas. För mer detaljerad information hänvisas till bruksanvisningen för Tandem t:slim X2.




Klicka på **INSTÄLLNINGAR**.




Klicka på **Tempbasal**.

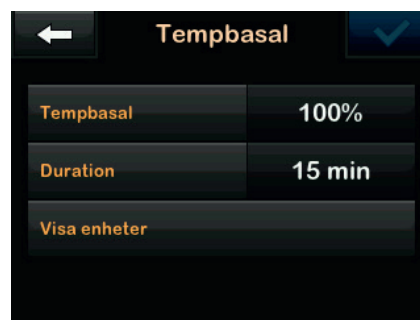


Klicka på **Tempbasal**.

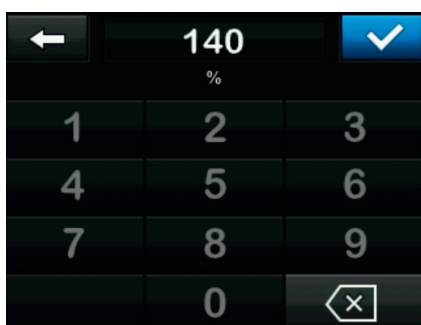

Använd skärmens knappsats för att ange önskad procent. Klicka på för att gå vidare.

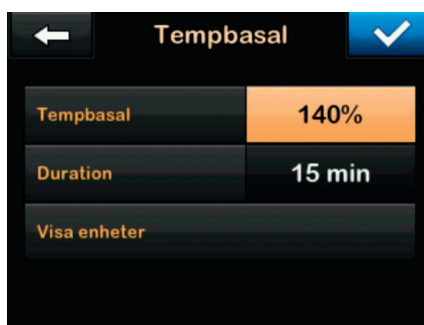

Klicka på **Duration** och använd knappsatsen för att ange önskad tidsperiod och sedan på för att gå vidare.

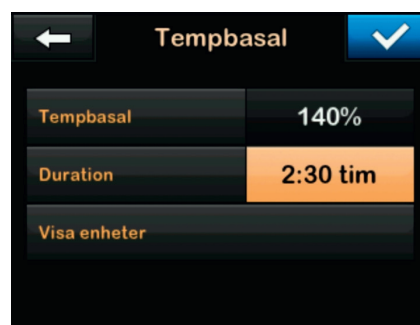

Kontrollera programmeringen och klicka på för start.



När du ser "splash-symbolen" har **Tempbasalen** startat.



Låsskärmen visar nu ett orange **T** bredvid indikatorn för insulinnivå för att indikera aktiv tempbasal. OBS: om tempbasal satts till 0%, visas ikonen **T** i rött.



OBS: För att avbryta en pågående Tempbasal, klicka på **INSTÄLLNINGAR** och klicka på . En bekräftelse-skärm öppnas, klicka på .