



# Bolus

## Tandem t:slim X2

Snabbguiden med anvisningarna nedan är ett referensverktyg för vårdgivare som redan är familjära med användningen av en insulinpump och med insulinbehandling i allmänhet. Observera att alla skärmbilder inte visas. För mer detaljerad information hänvisas till bruksanvisningen för Tandem t:slim X2.

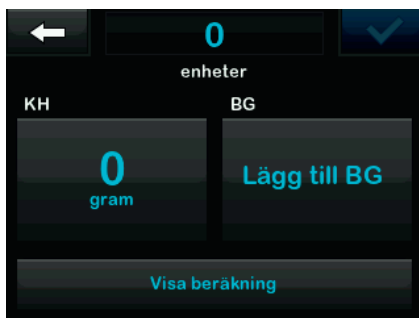


Klicka på **0 gram** för att ange kolhydratsmängd.

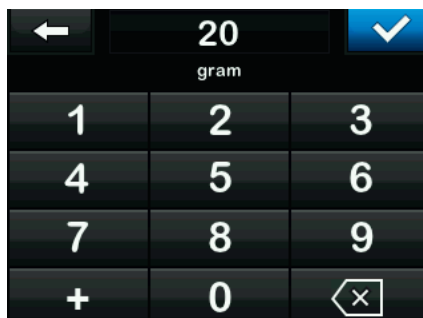

Ange mängden KH. Försäkra dig om att "gram" visas ovanför knappsatsen.



Lägg till BG. Vid CGM-användning överförs aktuellt sensorvärde.

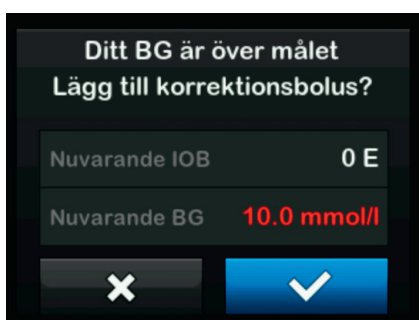

Om ett BG som är över BG-målet används blir man erbjuden att lägga till en korrektionsdel till bolusdosen. Klicka på  för att acceptera.



Klicka på  för att bekräfta mängden insulin.



Bekräfta förslaget genom att klicka på .



Klicka på  för att starta bolusdosen.



När du ser "splash-symbolen" har doseringen startat.



För att avbryta en påbörjad bolusdos, klicka på  i startskärmen. Bekräfta genom att klicka på .