

# Basal-IQ teknologi


## Insulindoseringen pauses hvis:

- Sensorverdien forventes synke under 4,4 mmol/l om 30 minutter  
*eller*
- Sensorverdien er 3,9 mmol/l eller lavere (akkurat nå)

## Insulindoseringen gjenopptas hvis:

- Sensorverdien stiger
- Sensorverdien er borte i mer enn 10 minutter
- Reglene for å pause gjelder ikke lenger
- Brukeren starter dosering
- Doseringen har vært pauset i 2 timer av en rullende 2,5 timers periode

\* Å gjenoppta doseringen er alltid prioritert

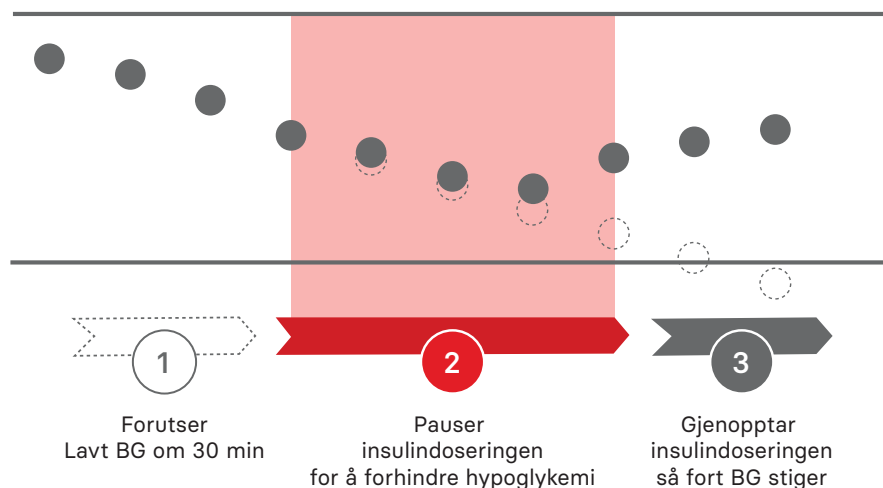

## Ved hvilke senarioer kan insulindoseringen forventes å pause?

- Ved sensorverdi på 9-10 mmol/l sammen med ↓ ↓
- Ved sensorverdi fra 8-9 mmol/l sammen med ↓
- Ved sensorverdi fra 7-8 mmol/l sammen med ↓
- Ved sensorverdi på 3,9 mmol/ eller lavere akuratt nå

# Menyoversikt Tandem t:slim X2 Basal-IQ-teknologi

