

STEG 5

- › Kontrollera att ALLA tidssegment är korrekt inprogrammerade, i kronologisk ordning och att alla inställningar blivit överförda.
- › Programmera in ALLA inställningar enligt tabellen i din Tandem t:slim X2™. Kontrollera att total basal är korrekt.

STEG 6

CGM-INSTÄLLNINGAR	
<input type="checkbox"/>	Hög varning: upprepa _____ min
<input type="checkbox"/>	Låg varning: upprepa _____ min
<input type="checkbox"/>	Stigningshastighet: <input type="checkbox"/> 0,11 mmol/l <input type="checkbox"/> 0,17 mmol/l
<input type="checkbox"/>	Minskingshastighet: <input type="checkbox"/> 0,11 mmol/l <input type="checkbox"/> 0,17 mmol/l
<input type="checkbox"/>	Utom räckvidd: _____ min
	Ljudvolym: <input type="checkbox"/> Vibration <input type="checkbox"/> Låg <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Hög

Att notera: Vid användning av Control-IQ™-teknologi finns det fasta varningar utöver CGM varning Hög och Låg. "Varning Control-IQ Hög" och "Varning Control-IQ Låg" går inte att stänga av.

STEG 7

ALGORITM			
Basal-IQ™-teknologi: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PÅ <input type="checkbox"/> AV	Control-IQ™-teknologi: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PÅ <input type="checkbox"/> AV
Stoppa varning:	<input type="checkbox"/> PÅ <input type="checkbox"/> AV	Vikt:	
Återuppta varning:	<input type="checkbox"/> PÅ <input type="checkbox"/> AV	Totalt dagligt insulin:	