


# Menyöversikt Tandem t:slim X2 Basal-IQ™-teknologi

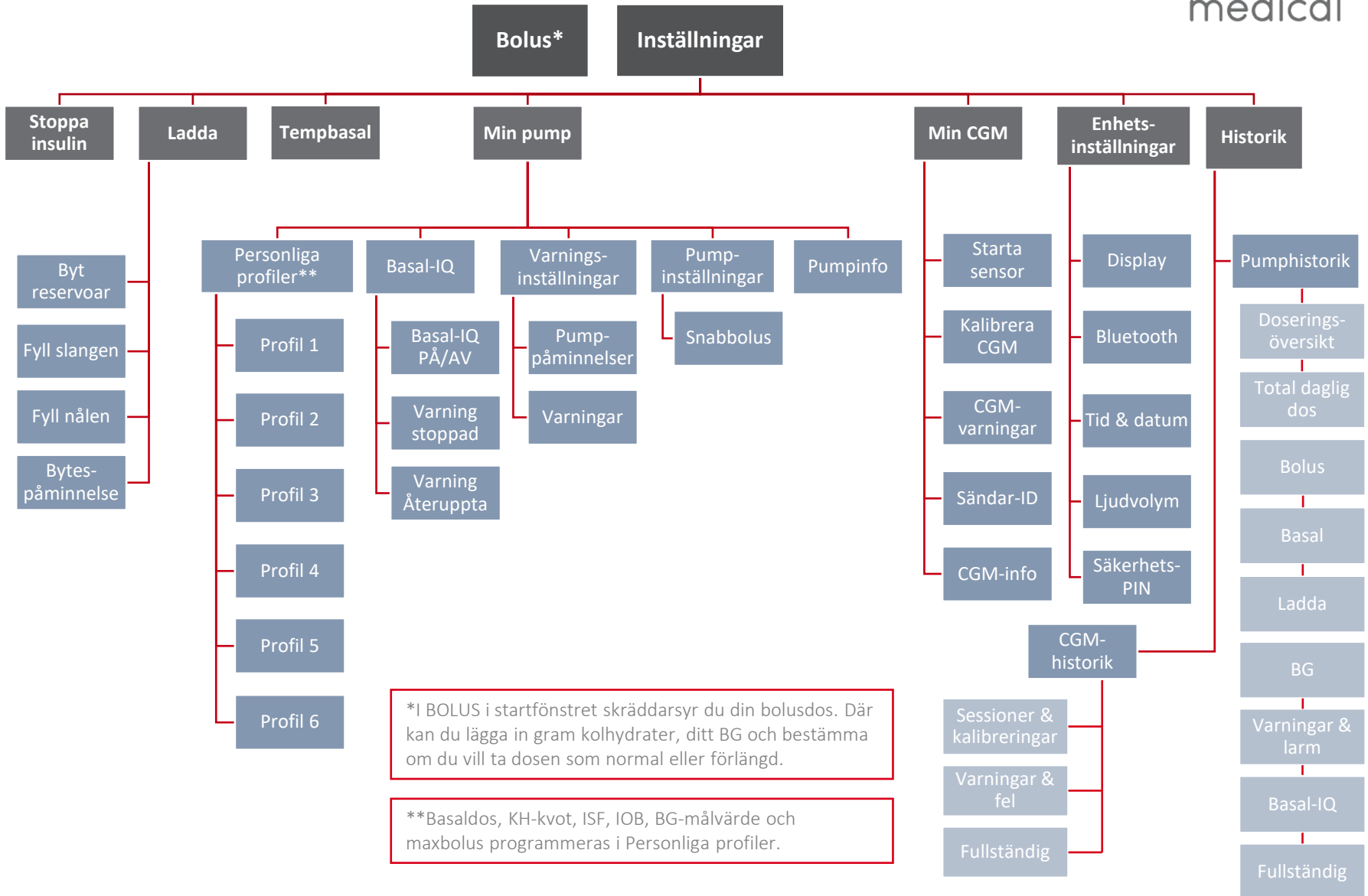

# Basal-IQ™-teknologi


## Insulindoseringen pausas OM:

- Sensorvärdet förväntas sjunka under 4,4 mmol/l om 30 minuter  
*eller*
- Sensorvärdet är 3,9 mmol/l eller lägre (just nu)

## Insulindoseringen återupptas OM:

- Sensorvärdet stiger
- Sensorvärde saknas i 10 minuter
- Reglerna för att pausa inte finns längre
- Användaren startar doseringen
- Doseringen har varit pausad i 2 tim över en rullande 2,5 tim tidsperiod

\* Att återuppta doseringen är alltid prioriterat

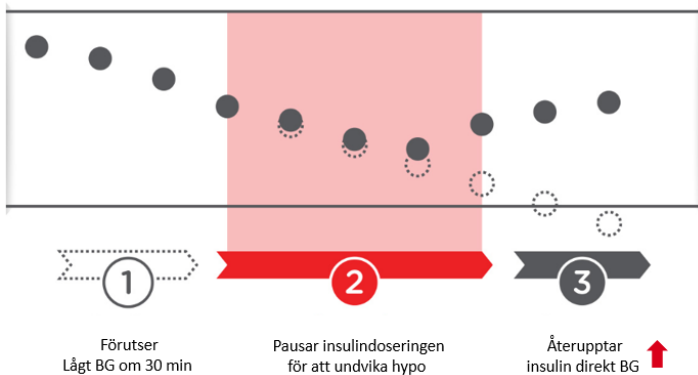

## När kan man förvänta sig att insulindoseringen pausas?

- Vid sensorvärde från 9-10 mmol/l tillsammans med ↓↓
- Vid sensorvärde från 8-9 mmol/l tillsammans med ↓
- Vid sensorvärde från 7-8 mmol/l tillsammans med ↘
- Vid sensorvärde 3,9 mmol/l eller lägre just nu

Diamant ikon  
Nedre delen blir röd när  
doseringen är pausad

"S" ikon vid  
pausad dosering



Röda staplar i CGM-  
fönstret vid pausad  
insulindosering

All dosering stoppad