

Basal-IQ™-teknologi

Tandem t:slim X2


Snabbguiden med anvisningarna nedan är ett referensverktyg för vårdgivare som redan är familjära med användningen av en insulinpump och med insulinbehandling i allmänhet. Observera att alla skärmbilder inte visas. För mer detaljerad information hänvisas till bruksanvisningen för Tandem t:slim X2.

Hur du aktiverar och inaktiverar Basal-IQ-funktionen:



1. Från menyn Inställningar, klicka på **Min pump**

→ 2. Klicka på **Basal-IQ**

→ 3. Klicka på Basal-IQ för att aktivera eller avaktivera funktionen. För att spara din ändring klicka på 

OBS: För att använda Basal-IQ-teknologin behöver inga varningar eller larm programmeras. I menyn för Basal-IQ kan du välja om du vill få varningar när doseringen pausas och/eller återupptas. Standardinställningen för dessa varningar är inaktiv.

SÄKERHETSÅTGÄRD: För att förutse om doseringen behöver pausas kräver Basal-IQ-funktionen information från din CGM-mätning. Om din pump och CGM inte kommunicerar med varandra kommer du att få varningen Utanför område. Den är automatiskt aktiverad och kommer att varna dig efter 20 minuter vid tappad kontakt. Tiden för Varning Utanför område och tappad kontakt kan ändras.

När Basal-IQ-teknologi är aktiv, syns aktivtetsstatus i startskärmen:

En röd ikon med bokstaven "S" indikerar att all insulindosering är pausad.


En grå diamantikon indikerar att Basal-IQ-funktionen är aktiverad. När insulindoseringen är pausad, kommer den nedre halvan av diamanten att vara röd.



Röda staplar i CGM-grafen indikerar att insulindoseringen varit pausad.

VAR 3:E MÅNAD

Anslut en ny CGM-sändare till pumpen:

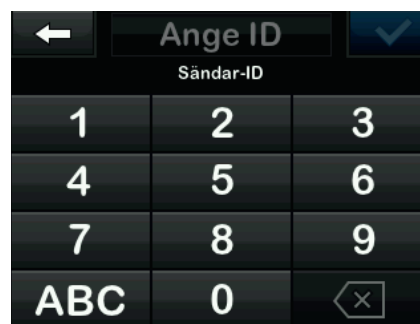


1. Leta upp ID-numret på undersidan av din sändare innan du sätter i den i sensorn.

→ 2. I menyn **Inställningar**, klicka på nedåtpilen. Klicka på **Min CGM > Sändar-ID**. Klicka på "Redigera".

3. Lägg in sändar-ID och klicka på Du kommer bli ombedd att lägga in ID numret igen för att säkerställa att det är rätt. Sändaren kommer sedan ansluta till pumpen.

VAR 10:E DAG

Starta en ny sensorsession:

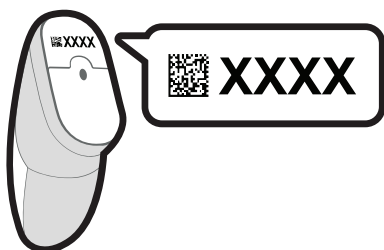

1. Leta upp sensorkoden på skyddspappret som sitter på undersidan av applikatorn.

→ 2. I menyn **Inställningar**, klicka på: **Min CGM > STARTA SENSOR** och ange sensorkoden. Om du tänker kalibrera din sensor med en blodsockermätare, eller om du redan angett koden i en separat CGM app, klicka på **Min CGM > STARTA SENSOR > AVSTÅ**.

3. Klicka på för att bekräfta start av en ny CGM sensorsession.



OBS: Nedräknings-symbolen fylls på över tid för att visa hur mycket tid som återstår innan pumpen är redo att visa aktuella CGM-värden.

Om en sensorkod inte anges innan start av en sensorsession, kommer t:slim X2 pumpen be dig att kalibrera med en blodsockermätare vid regelbundna intervall. Anger du en sensorkod, kommer du inte bli ombedd att kalibrera. Om varningar och sensorvärdet inte stämmer överens med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för kontroll och behandlingsbeslut.

4. Du kommer att se startskärmen med en nedräkningssymbol som indikerar att uppstartsperioden på 2 timmar har startat. Under denna tiden, kommer du inte få några sensorvärden.