

# Ny mjukvaruuppdatering till din Tandem t:slim X2™ insulinpump med **Control-IQ-teknologi**

Tandem Diabetes Care utvecklar kontinuerligt mjukvarorna i insulinpumpen för att optimera behandlingen och möta användarnas önskemål.

Den nya mjukvaruuppdateringen till insulinpumpen Tandem t:slim X2 ger dig ännu bättre användarvänlighet och tydligare översikt.

## Nya funktioner:

**Bolusikoner** i CGM-trendgrafen ger dig ännu bättre översikt. Redan i pumpens startfönster kan du se dina bolusdoser och korrektionsdoser, vilket underlättar rätt behandlingsbeslut. Tre olika bolusikoner används för att visa normal bolus, förlängd bolus och automatisk korrektionsbolus.

**Ny smidig timerfunktion** när du behöver stoppa insulindoseringen manuellt. Du kan nu ställa in ett larm på 15 minuter, 30 minuter, 45 minuter eller 60 minuter, vilket ger dig större flexibilitet. När din valda tid har passerat kommer du få en påminnelse om att återuppta doseringen.

När du ska **fylla nålen** har pumpen nu alternativ som är bättre anpassade till ditt infusionsset. Standardinställningen är 0,3 enheter men du kan även välja 0,5 enheter och 0,7 enheter, beroende på vilket infusionsset du använder. Det gör byte av infusionsset smidigare. Du kan fortfarande ange annat värde vid behov.


För att du bara ska få larm när det verkligen behövs har **varningen "Control-IQ Hög" justerats**. Nu upprepas den varannan timme så länge villkoren för varningen kvarstår eller om villkoret åter är aktuellt.

Om **Träningsprofilen** och **Sömnschemat** överlappar i tidsinställningen går pumpen automatiskt över till Sömnschemat när du stänger av Träningsprofilen. Smidigt om du använder Träningsprofilen sent på kvällen.


### Bolusikoner i CGM-trendgrafen



Normal bolus

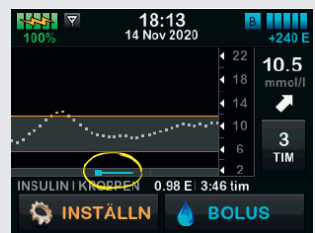


Förlängd bolus

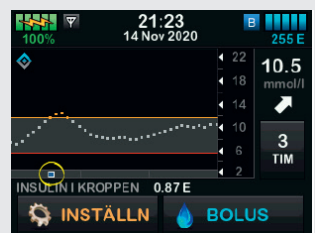

Automatisk korrektionsbolus

### Timerfunktion när pump stoppas manuellt

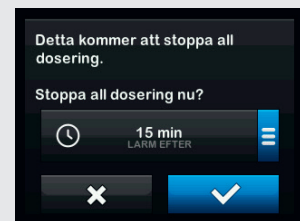

### Förinställning för "Fyll nålen"



Avser mjukvara 7.6