

Ny mjukvaruuppdatering till din Tandem t:slim X2™ insulinpump med **Basal-IQ-teknologi**

Tandem Diabetes Care utvecklar kontinuerligt mjukvarorna i insulinpumpen för att optimera behandlingen och möta användarnas önskemål.

Den nya uppdateringen till insulinpumpen Tandem t:slim X2 ger dig ännu bättre användarvänlighet och tydligare översikt.

Nya funktioner:

Bolusikoner i CGM-trendgrafen ger dig ännu bättre översikt. Redan i pumpens startfönster kan du se dina bolusdoser och korrektionsdoser, vilket underlättar rätt behandlingsbeslut. Till höger ser du ikoner för normal bolus och förlängd bolus.

Ny smidig timerfunktion när du behöver stoppa insulindoseringen manuellt. Du kan nu ställa in ett larm på 15 minuter, 30 minuter, 45 minuter eller 60 minuter, vilket ger dig större flexibilitet. När din valda tid har passerat kommer du få en påminnelse om att återuppta doseringen.

När du ska **fylla nålen** har pumpen nu alternativ som är bättre anpassade till ditt infusionsset. Standardinställningen är 0,3 enheter men du kan även välja 0,5 enheter och 0,7 enheter, beroende på vilket infusionsset du använder. Det gör byte av infusionsset smidigare. Du kan fortfarande ange annat värde vid behov.

Ytterligare funktioner för dig som går från Basal-IQ-teknologi med mjukvara 6.3:

Om du är osäker på vilken mjukvara du har hittar du det i *Inställningar* → *Min pump* → *Pumpinfo* → *sida 2* → *t:slim programvara*.


Du kan nu programmera en **max basaldos/timme**, som en del av din Personliga profil. Du hittar max basal i *Inställningar* → *Min Pump* → *Personlig profil* → *Pumpinställningar*.

Uppdaterad menystruktur. Pumpinställningar finns nu i Personliga profiler istället för som tidigare, i *Min pump*.

Bolusikoner i CGM-trendgrafen




Normal bolus

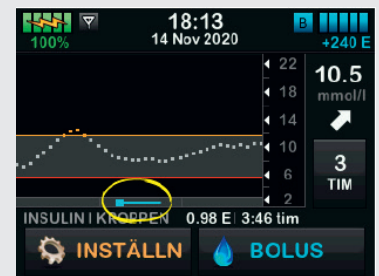

Förlängd bolus

Timerfunktion när pump stoppas manuellt

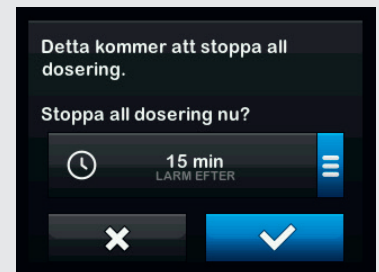

Förinställning för "Fyll nålen"



Avser mjukvara 6.6