

# Så här applicerar du AutoSoft 90



AutoSoft™ 90 är ett infusionsset med mjuk kanyl.

**OBS!** Välj ett infusionsställe som har rekommenderats av sjukvårdspersonalen. Använd inte ett ställe precis bredvid det tidigare infusionsstället. Tvätta händerna. Rengör området på och runt infusionsstället med desinfektionsmedel. Kontrollera att området är torrt.



För att öppna, dra i den röda tejpens för att ta bort plastförseglingen. Ta bort det sterila pappret. **ANVÄND INTE** om förseglingen eller det sterila pappret har brutits.



Tryck bestämt på de tre upphöjda punkterna på varje sida av locket och lyft uppåt. **VAR FÖRSIKTIG** så att du inte böjer eller vidrör införingsnålen.




**VRID FÖRSIKTIGT** ut slangens ände ur skåran. Snurra slangens ände ur applikatorn genom att dra den försiktigt uppåt.

**Viktigt:** Dra inte för hårt. Infusionssetet kan lossna från applikatorn av misstag.



Fäst slangens i reservoarens t:lock-koppling. Vrid medurs tills det blir tätt, vrid sedan ett kvarts varv till för säker anslutning.

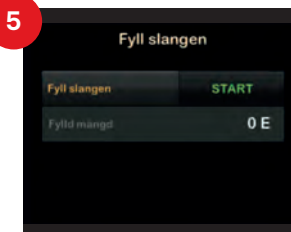

Fyll slangens med insulin enligt instruktionerna i bruksanvisningen för insulinpumpen.

**FYLL INTE** slangens när infusionssetet är anslutet till din kropp.



När du fyller slangens, håll den rakt upp vid t:lock anslutningen. Se till att det inte finns några luftbubblor i anslutningskopplingen eller slangens.



Håll nålen nedåtriktad medan slangens fylls. De ungefärliga fyllnadsvolymerna är 10–15 enheter för 60 cm slang och 20–25 enheter för 110 cm slang. Sluta efter att tre droppar insulin har kommit ut från nålen.



Snurra försiktigt av skyddspappret. **DRA INTE** för hårt i pappret. Då riskerar kanylhuset att lossna från applikatorn.



**FÄST INTE** slangens i skåran innan du laddar applikatorn. Ladda applikatorn genom att placera fingrarna på de streckade räfflorna och dra utåt tills du hör ett klick.



**VRID FÖRSIKTIGT** bort nålskyddet. Säkerställ att kanylhuset fortfarande sitter fast i applikatorn.



Fäst slangens i den närmaste skåran.



**SÄKERSTÄLL** att du ser införingsnålen av stål sticka ut ur den mjuka kanylen innan du applicerar.

13



Placera applikatoren på infusionsstället. Applicera genom att trycka på de runda fördjupningarna på båda sidorna samtidigt. Triangeln inuti insättningsenheten pekar i den riktning som slangen kommer att vara vänd.

14




Tryck försiktigt i mitten av applikatoren för att fästa tejpen ordentligt på huden. Du kan släppa applikatorns ytterkanter när du gör detta.

15



Ta bort applikatoren genom att ta tag i mitten och försiktigt dra den utåt. Håll enbart i den vita mittdelen. Massera försiktigt fast tejpen på huden.

16

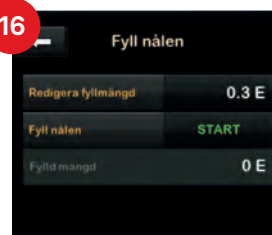

Fyll det tomma utrymmet i kanylen med nedanstående mängd insulin:

U-100 INSULIN:  
6 mm: 0,3 enheter  
9 mm: 0,5 enheter

**KONTROLLERA ALLTID** blodsockret 1-2 timmar efter applicering för att säkerställa att infusionssettet fungerar som det ska.

## Så här kopplar du ifrån och återansluter

1



Placera ditt finger framför kanylens hölje, kläm försiktigt på sidorna av infusionssettet och dra anslutningsnålen rakt ut.

2



Håll i anslutningsnålen och för in den i kanylhuset. Du ska höra ett klick.



Scanna koden och se filmen om hur du applicerar infusionssettet AutoSoft™ 90.

Materialet är en förkortad version hämtad ur AutoSoft™ 90 bruksanvisning. Vänligen se bruksanvisningen för komplett information.