

Så här laddar du en ny reservoar i insulinpumpen Tandem t:slim X2


Obs: Detta är ett förkortat instruktionsmaterial. Endast vissa steg och skärmar visas. För mer detaljerad information hänvisar vi till bruksanvisningen för insulinpumpen Tandem t:slim X2™.



Innan du börjar ska du fylla en ny reservoar med insulin. Se sida 3 och 4 för detaljerade instruktioner hur man fyller en reservoar.



1

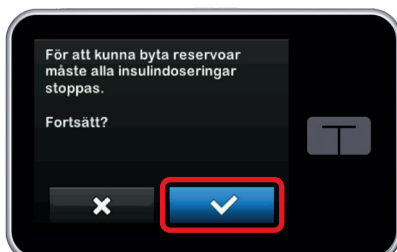


Från startskärmen trycker du på **INSTÄLLNINGAR**. Tryck på Ladda. Tryck på Byt reservoar. Tryck för att bekräfta att all insulin-dosering kommer att stoppas.

2




Koppla bort infusionssetet från din kropp och tryck på för att fortsätta.

3

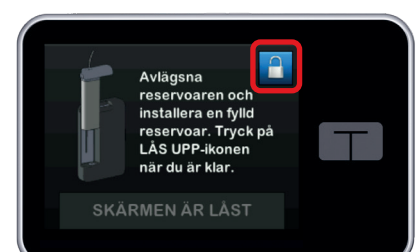

Ta bort den använda reservoaren och installera den nya fyllda reservoaren. Tryck på den blå rutan med hänglåset (=LÅS UPP). Tryck sedan på för att fortsätta. Avvakta/låt pumpen vara under tiden som **DETEKTERAR RESERVOAR** visas på skärmen.

4

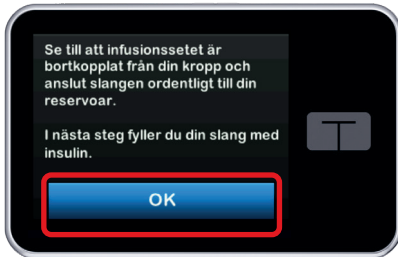

SE TILL att infusionssetet är bortkopplat från din kropp.

Anslut slangen från infusionssetet till anslutningskopplingen på reservoarslangen. Vrid medurs tills den är tät. Tryck **OK** för att bekräfta att infusionssetet är bortkopplat från kroppen.

5



Håll pumpen upprätt för att säkerställa att eventuell luft i reservoaren avlägsnas. Tryck på **START**. Beroende på dina ljudvolyminställningar kan pumpen både vibrera och pipa samtidigt under tiden slangen fylls med insulin.


FYLL INTE slangen när infusionssetet är anslutet till din kropp.

6



Tryck på **STOPP** när tre droppar insulin har kommit ut från införsningsnålen på infusionssetet. Bekräfta att dropparna visas genom att trycka på **KLAR**.

7

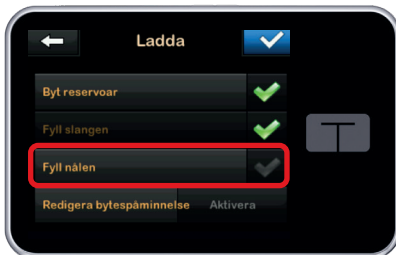

Tryck på **Fyll nålen**. Applicera det nya infusionssetet och tryck sedan på **✓**.

Om du använder TruSteel™ ska du **INTE** fylla nålen då stål nålen till detta infusionsset fylls samtidigt som du fyller slangen. Gå då vidare till steg 9.

8




Beroende på vilket infusionsset du använder krävs olika fyllnadsmängd för plastnålen. Se bruksanvisningen för det infusionsset du använder. Redigera eventuell fyllnadsmängd. Tryck därefter **START**. Invänta att pumpen automatisk stoppar fyllningen.

9




När nålen är fylld kan du ställa in en bytespåminnelse. Tryck på **✓** om inställningarna är korrekta. Tryck på **Redigera bytespåminnelse** för att ändra inställningarna.

10

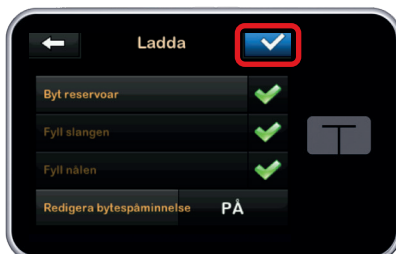

Tryck på **✓**. En påminnelse om att testa BG om 1 till 2 timmar visas.

11

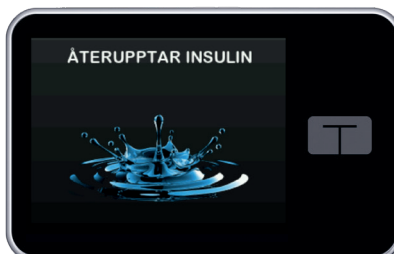

Tryck på **✓** för att återuppta insulin doseringen när du är klar. Skärmen **ÅTERUPPTAR INSULIN** visas tillfälligt.



KONTROLLERA ALLTID

blodsöcket 1-2 timmar efter applicering av nytt infusionsset för att säkerställa att infusionssetet fungerar som det ska.

Fylla på en Tandem t:slim X2™-reservoar från en injektionsflaska





Obs: Detta är ett förkortat instruktionsmaterial. Endast vissa steg och skärmar visas. För mer detaljerad information hänvisar vi till bruksanvisningen för Tandem t:slim X2™ insulinpump.

1. Inspektera nål- och sprutförpackningen med avseende på tecken på skador. Kassera skadade produkter.
2. Tvätta dina händer noggrant. Torka av gummiseptumet på injektionsflaskan med en tvättlapp med alkohol.
3. Vrid på nålen ordentligt på sprutan. Ta försiktigt bort skyddet från nålen genom att dra det utåt.
4. Dra in luft i sprutan upp till önskad mängd insulin.
5. För in nålen i injektionsflaskan som står upprätt. Injicera luft från sprutan in i injektionsflaskan. Bibehåll trycket på sprutkolven (**se figur A**).
6. Vänd injektionsflaskan och sprutan upp och ned med nålen fortfarande införd i injektionsflaskan. Släpp sprutkolven. Insulinet ska börja flöda från injektionsflaskan till sprutan (**se figur B**).

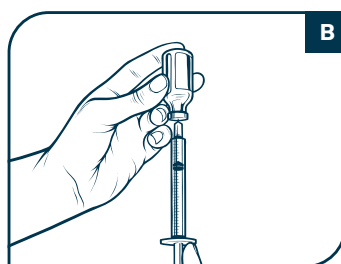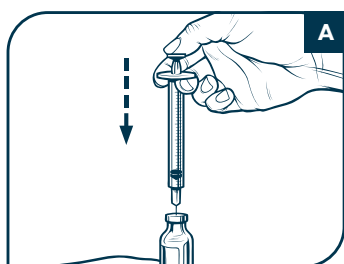




Fyll sprutan med den insulinmängd du behöver till nästa byte av reservoar och lägg till 50 enheter utöver uppskattad mängd. Vi rekommenderar minst 120 E totalt.

7. Dra sakta tillbaka kolven till önskad insulinmängd.
8. Medan nålen fortfarande är i injektionsflaskan upp och ned, snärta till sprutan så att eventuella luftbubblor stiger till ytan (**se figur C**). Tryck sedan kolven försiktigt uppåt och tvinga eventuella luftbubblor tillbaka in i injektionsflaskan.
9. Kontrollera sprutan för luftbubblor och gör något av följande: Upprepa steg 8 om luftbubblor syns. Om det inte finns några luftbubblor tar du bort nålen från injektionsflaskan.
10. Inspektera reservoarförpackningen och kassera skadade produkter.
11. Öppna förpackningen och ta ur reservoaren.
12. Håll reservoaren upprätt (**se figur D**) och för varsamt in nålen i den vita insulin-fyllningsporten på reservoarens kammare (**se figur E**). Antingen stannar nålen halvvägs men den kan också gå ner hela vägen, BÅDA är OK.
13. Innan man fyller en ny reservoar med insulin är det viktigt att man först drar ut luft ur reservoarens kammare. Håll sprutan vertikalt i linje med reservoaren med nålen inuti fyllningsporten och dra försiktigt tillbaka kolven (**se figur F**). Detta tar bort eventuell återstående luft i reservoarens kammare. Det räcker att 1-2 luftbubblor stiger uppåt mot kolven.

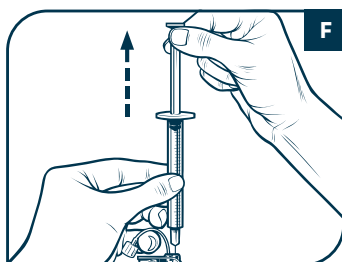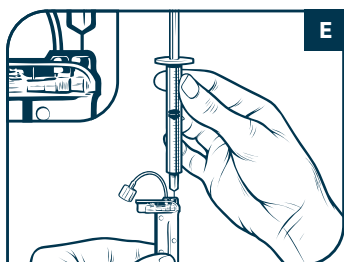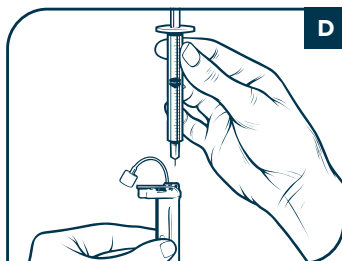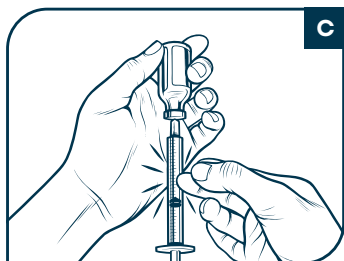

Fortsättning på nästa sida.

14. Se till att nålen är kvar i fyllningsporten och släpp kolven. Trycket kommer att dra kolven till sin ursprungsposition men kommer INTE att trycka tillbaka luft i reservoaren.
15. Dra ut nålen från fyllnadsporten.
16. Vänd sprutan upprätt och dra ned kolven (**se figur G**). Snärta till sprutan för att se till att eventuella luftbubblor stiger till toppen.
17. Tryck försiktigt på kolven för att ta bort luftbubblor tills insulin fyller hela det orangegula kanylhuset men också hela nålen och du ser minst en droppe insulin vid nålspetsen (**se figur H**).
18. För in nålen på nytt i fyllningsporten och fyll långsamt reservoaren med insulin (**se figur I**). Det är normalt att känna lite motstånd medan du långsamt trycker på kolven.
19. Bibehåll trycket på kolven medan du tar bort nålen från reservoaren. Kontrollera så att inget läckage finns i reservoaren. Om du upptäcker insulinläckage ska du kassera reservoaren och upprepa hela processen med en ny reservoar.
20. Kassera alltid nålar, sprutor, reservoarer och infusionsset i enlighet med lokala förordningar. Nålarna ska kasseras i en lämplig behållare för vassa föremål. Försök inte att sätta på lock på nålarna igen, då det finns risk att du sticker dig. Tvätta händerna noga efter hantering av komponenter.

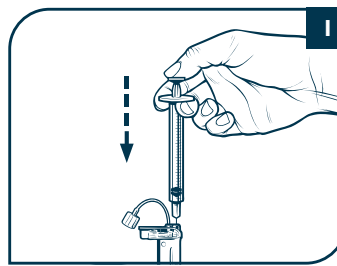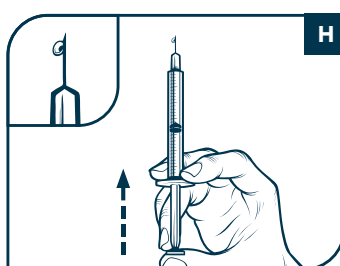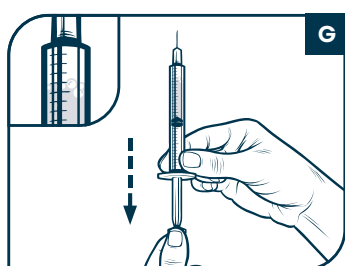

Vid frågor om din diabetesbehandling, kontakta ditt diabetesteam.



Scanna koden och se filmen om hur du laddar en ny reservoar.

Du hittar fler instruktionsfilmer på [rubinmedical.se](https://www.rubinmedical.se)

Materialet är en förkortad version hämtad ur Tandem t:slim X2™ bruksanvisning. Vänligen se bruksanvisningen för komplett information. Insulinpumpen Tandem t:slim X2 är indicerad för användning hos individer som är 6 år eller äldre.