



Säkerhetskontroll och insulinpumpsystemet Tandem t:slim X2 och Dexcom CGM

När du reser med ditt insulinpumpsystem är det bra att vara förberedd vid säkerhetskontrollen på flygplatsen:

- Informera säkerhetspersonalen om att du bär insulinpumpen Tandem t:slim X2 och Dexcom CGM.
- Du kan bära både insulinpumpen och sensorn när du passerar en vanlig metalledetektor.
- Låt aldrig din **Tandem t:slim X2 insulinpump** genomgå röntgen, till exempel den som används för handbagage eller incheckat bagage.
- Passera inte en helkroppsskanner med insulinpumpen. Be i stället om en manuell säkerhetskontroll av pumpen.
- Om du använder **Dexcom G7** går det bra att passera genom en helkroppsskanner utan insulinpump.
- Om du använder **Dexcom G6** får sensorn inte exponeras för en helkroppsskanner. Be i stället om en manuell kontroll.

Vid säkerhetskontroll av bagage används antingen CT-skanning eller traditionell röntgen.

- CT-skanning: Om du inte ombeds ta ut vätskor eller elektroniska föremål ur väskan används normalt CT-skanning. Då kan extra Dexcom-sensorer ligga kvar i handbagaget.
- Traditionell röntgen: Om du ombeds ta ut vätskor och elektronik ur handbagaget används äldre röntgenteknik. Ta då ut dina extra Dexcom-sensorer och be om en manuell inspektion.

Tänk på att ha med dig läkarintyg och extra förbrukningsartiklar i ditt handbagage för att säkerställa en smidig och säker resa.

Är det säkert att flyga flygplan med Tandem t:slim X2 insulinpump?

Ja, insulinpumpen Tandem t:slim X2 är testad för säker användning hos kommersiella flygbolag och uppfyller alla krav för att användas ombord på flygplan¹. Tandem t:slim X2 doserar insulin via Micro-Delivery-teknologi vilket innebär att insulindoseringen inte påverkas av förändrade lufttrycksförhållanden. Micro-Delivery-teknologi minskar risken för oavsiktlig insulindosering och möjliggör mycket precisa insulindoser.



Skanna QR-koden och ladda ner ett informationsblad, som du kan visa personalen på flygplatsen om frågor kring dina hjälpmedel skulle uppstå.

För senaste nytt, bli en del av vårt community på

facebook.com/rubinmedical

instagram.com/rubin.medical

Teknisk support tisdagar och onsdagar 08.00-19.00

Övriga vardagar 08.00-16.30:

040-15 54 80

Övrig tid teknisk pumpsupport:

044-330 220

www.rubinmedical.se



¹ Horn KJ, Hoffman JA. Insulin Delivery Pumps for Human Spaceflight: Steps Toward an Accessible Space Future. Wilderness Environ Med. 2025 Jan 17;10806032241304439. doi: 10.1177/10806032241304439



Viktig säkerhetsinformation: www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Rubin Medical AB. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care, Tandems logotyper, t:slim X2, och Micro-Delivery är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care, Inc. i USA och/eller andra länder. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7, och alla relaterade logotyper och grafiska symboler är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken från tredje part tillhör deras respektive ägare.