



Tandem Source


Mjukvaruuppdatera din insulinpump

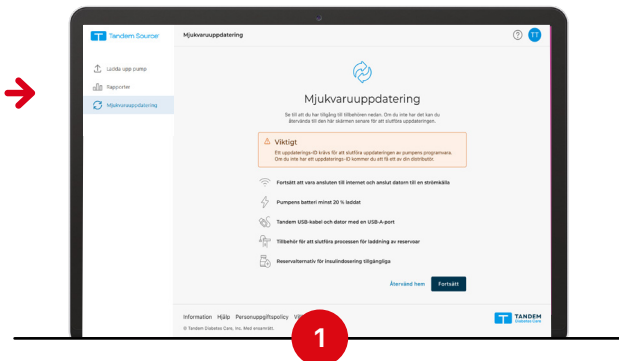


Dessa instruktioner beskriver hur du mjukvaruuppdaterar din Tandem t:slim X2 insulinpump i Tandem Source för att få tillgång till nya funktioner.

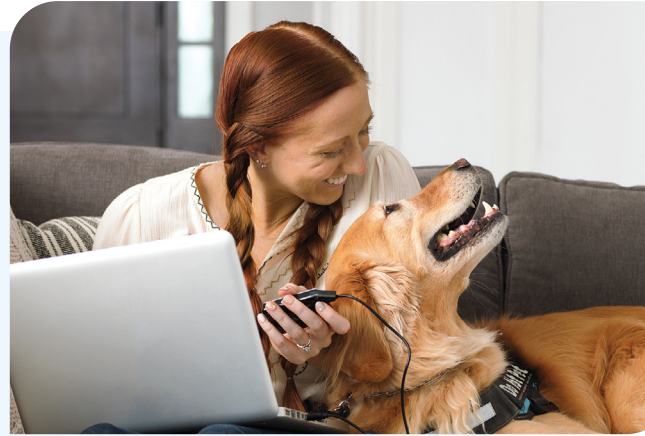

Logga in på plattformen Tandem Source. Välj **Mjukvaruuppdatering** från menyn till vänster. Klicka på **Fortsätt** efter att ha granskat uppdateringskraven och säkerhetsinformationen.

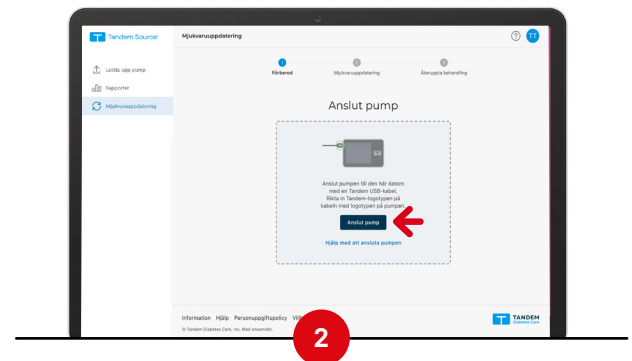

Anslut mikro-USB-änden på USB-kabeln från Tandem Diabetes Care till insulinpumpen och anslut den andra änden till en USB-port på datorn. Klicka på **Anslut pump**.

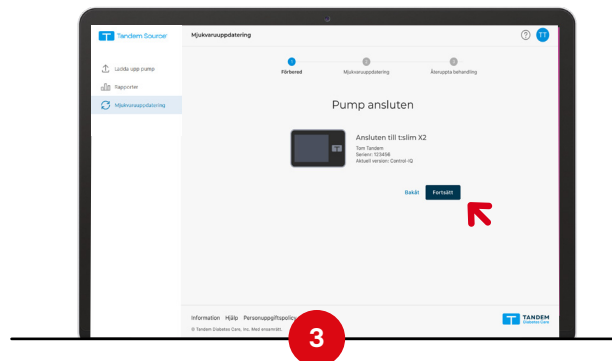

En skärm som visar **Pump ansluten** visas om anslutningen lyckas. Bekräfta att pumpens serienummer är korrekt innan du klickar på **Fortsätt**.



Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen i Tandem Source och slutför alla nödvändiga åtgärder på din Tandem t:slim X2 insulinpump.



En skärm för omstart av pumpen visas. Tryck på för att starta omstarten och bekräfta att insulintillförseln stoppas.




Programuppdateringen börjar. Koppla inte från internet eller koppla ur pumpen från datorn under denna process.



Använd knappsatsen på pumpen, ange uppdaterings-ID som står på skärmen i Tandem Source och tryck på för att fortsätta.



Uppdateringen är klar.

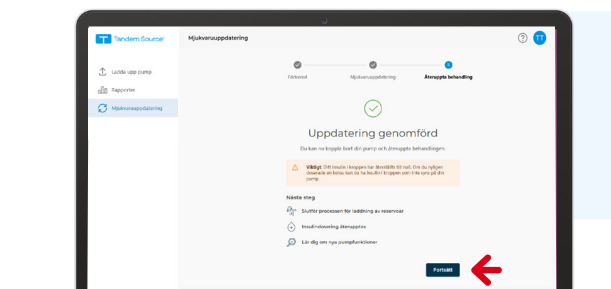

Viktigt: Klicka på **Fortsätt** i Tandem Source för ytterligare instruktioner om hur du säkert återupptar insulintillförseln.

Kontakta Rubin Medical vid behov av ytterligare support

Obs: Detta är ett förkortat instruktionsmaterial. Endast vissa steg och skärmar visas. För mer detaljerad information hänvisar vi till bruksanvisningen för Tandem t:slim X2 insulinpump.

Viktig säkerhetsinformation: Insulinpumpen Tandem t:slim X2 är avsedd för subkutan dosering av insulin enligt ordination, för behandling av diabetes mellitus hos personer som behöver insulin. Pumpen kan på ett tillförlitligt och säkert sätt kommunicera med kompatibla, digitalt anslutna enheter.

WARNING: Control-IQ-teknologi ska inte användas hos personer under 6 års ålder. Control-IQ-teknologi ska inte heller användas på personer som behöver mindre än 10 enheter insulin per dag eller som väger mindre än 25 kilogram. Besök tandemdiabetes.com/safetyinfo för ytterligare viktig säkerhetsinformation.