





Applicera en ny **FreeStyle Libre 3 Plus** sensor och parkoppla mobilappen Tandem t:slim med insulinpumpen Tandem t:slim X2 innan du påbörjar dessa steg.




För iOS-användare, hoppa till steg 4. För Android-användare, tryck **Inställningar** på startskärmen på din smartphone.

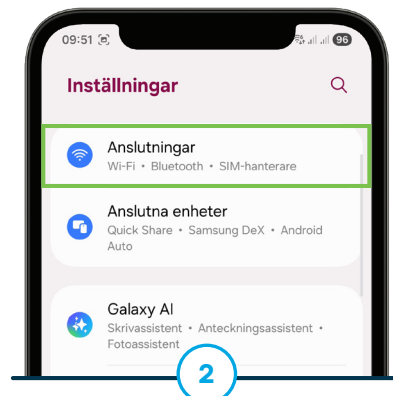

Tryck **Anslutningar** för att fortsätta.

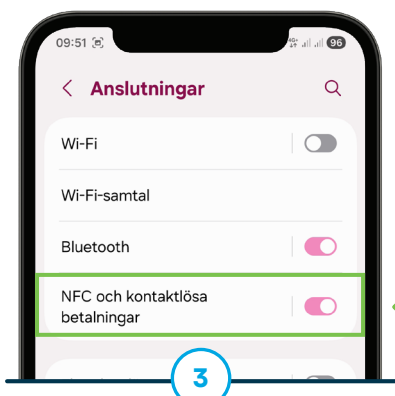

Säkerställ att **NFC för kontaktlösa betalningar** är aktiverat.

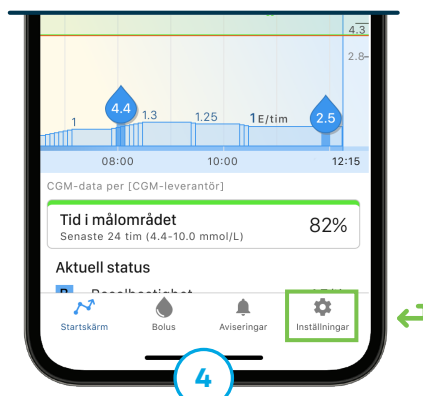

Tryck på **Inställningar** i navigeringsfältet i mobilappen Tandem t:slim.



Tryck **CGM** och sedan **FreeStyle Libre 3 Plus** för att fortsätta.



För Android-användare, hoppa till nästa steg. För iOS-användare, tryck **Starta skanning** för att fortsätta.



Håll toppen (iOS) eller baksidan (Android) av smarttelefonen nära sensorn tills den vibrerar eller ett larm hörs.



Skärmen för **Sensor session startad** visas. Tryck **OK**.

Starta sensorsession (fortsättning)



En CGM-trendgraf och en symbol för nedräkning av 1 timmes sensoruppstart kommer att visas.



Symbolen fylls över tid för att visa hur mycket tid som är kvar.



När uppstarten är klar börjar den nya sensorsessionen.






Automatiskt stopp av sensor

Sensorn FreeStyle Libre 3 Plus har indikation för användning i upp till 15 dagar. Skärmen **Sensorbyte snart** visas på pumpen för att informera användaren om hur lång tid det är kvar tills sensor-sessionen för kontinuerlig glukosmätning (CGM) är slut.

Användaren har möjlighet att manuellt stoppa sensor-sessionen innan den löper ut eller låta sensorn stängas av automatiskt.

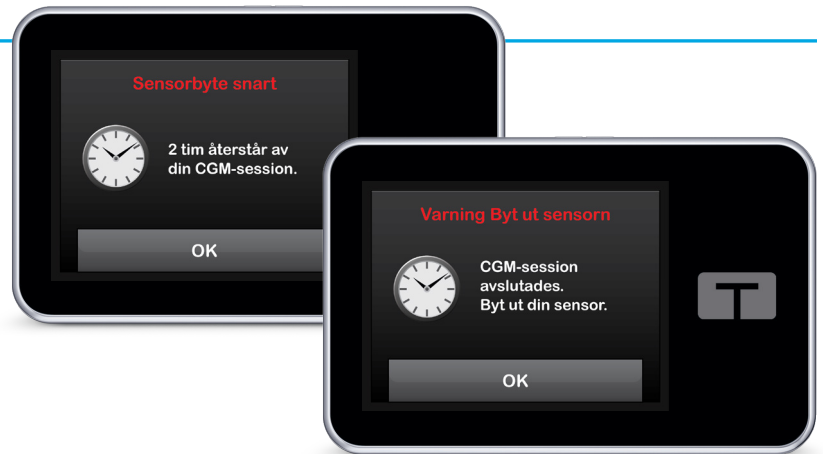

Manuellt stopp



Dessa instruktioner visar pumpanvändare hur de kan stoppa en sensor-session med **FreeStyle Libre 3 Plus** manuellt.



Tryck på **INSTÄLLNINGAR** på startskärmen. Tryck på nedåtpilen och sedan på **Min CGM**.



Tryck på **STOPPA SENSOR**.



Tryck på för att bekräfta att användaren vill stoppa sin pågående sensor-session.



Tryck på för att bekräfta att sessionen kan inte startas om.



Startskärmen visas med ikonen **Byt ut sensorn**.

Återstående sensortid

När som helst under sensor-sessionen kan man ta reda på när sensor-sessionen startades och hur mycket tid som återstår. Tryck på symbolen för insulin-nivån på startskärmen och tryck sedan på nedåtpilen två gånger.

Man kan också se hur lång tid som återstår av nuvarande sensor-session och eventuella varningar om Sensorbyte snart i mobilappen Tandem t:slim.



Besök [rubinmedical.se](https://www.rubinmedical.se) för ytterligare information.

Detta är ett förkortat instruktionsmaterial. Endast vissa steg och skärmar visas. För mer detaljerad information hänvisar vi till bruksanvisningen för insulinpumpen Tandem t:slim X2.

Viktig säkerhetsinformation: Insulinpumpen Tandem t:slim X2 med Control-IQ+ teknologi är avsedd för behandling av typ 1-diabetes hos personer från 2 års ålder. Besök tandemdiabetes.com/safetyinfo för ytterligare viktig säkerhetsinformation.

WARNING: Control-IQ+ teknologi ska inte användas hos personer under 2 års ålder med typ 1-diabetes. Control-IQ+ teknologi ska inte heller användas hos personer som behöver mindre än 5 enheter insulin per dag eller som väger mindre än 9 kilogram, eftersom detta är de minimivärden som krävs för att Control-IQ+ ska kunna fungera säkert. Besök tandemdiabetes.com/safetyinfo för ytterligare viktig säkerhetsinformation.

© 2025 Tandem Diabetes Care, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care, Tandem logotyper, Control-IQ+, t:slim X2 och t:slim är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care, Inc. i USA och/eller andra länder. Sensorsnors hölje, FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken tillhör Abbott och används med tillåtelse. Alla andra varumärken från tredje part tillhör deras respektive ägare.