




Innan du börjar
- ha en nyfylld
reservoar redo.

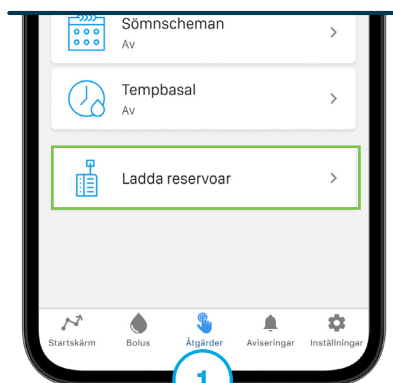

Tryck på **Åtgärder** i
navigeringsfältet och välj
Ladda reservoar.



Tryck på **Byt reservoar** och
sedan **Ja** för att stoppa
insulindoseringen.



Koppla loss infusionssetet från
kroppen vid infusionsstället.
Tryck på **Fortsätt**.



Installera den nyfyllda
reservoaren och tryck på
Fortsätt. Tryck på **Fortsätt** igen.



Koppla ihop infusionssetets
slang och reservoaren.
Tryck på **Fortsätt**.




Tryck på **Ja** för att bekräfta att
infusionssetet är bortkopplat
från kroppen.



Håll pumpen och slangen
upprätt. Tryck och håll nere
Pumpknappen.




När du ser tre droppar
komma från nålen,
släpp **Pumpknappen**.

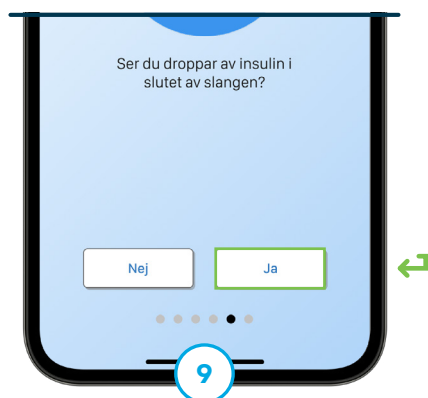

Tryck på **Ja** och anslut slangen till det befintliga eller nysatta infusionssetet.




Tryck på **Slutför**. Om det behövs, tryck på Fyll nålen. Annars, gå vidare till steg 13.

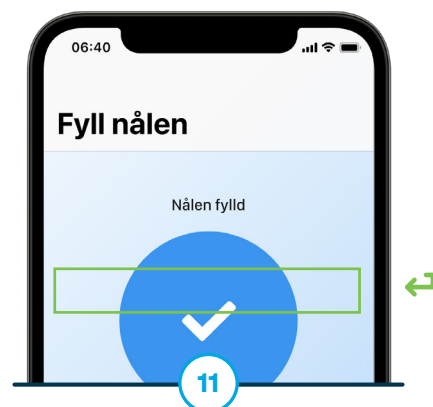

Om det behövs, tryck på **Fyllmängd** för att redigera. Annars, gå vidare till nästa steg.



Tryck på **Start** för att fylla nålen. Tryck på **Slutför** för att fortsätta.

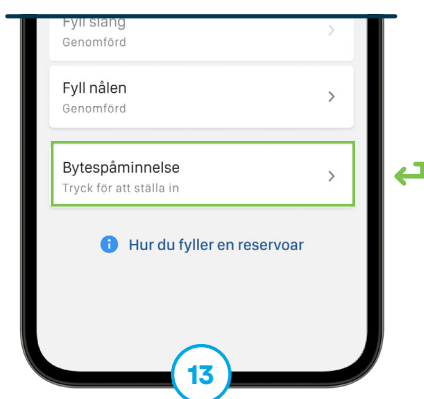

Om du vill, tryck på **Bytespåminnelse** och slå på reglaget. Gör ändringar och/eller tryck på **Spara**. Annars, gå vidare till nästa steg.



Tryck på **Klart** för att fortsätta och sedan på **Ja** för att återuppta insulin doseringen.



Pumptips: Pumpen får aldrig vara ansluten till kroppen när slangen fylls.

Dessa instruktioner tillhandahålls som ett referensverktyg för pumpanvändare och vårdgivare som redan är bekanta med användningen av en insulinpump och insulinbehandling i allmänhet. Alla skärmar visas inte. För mer detaljerad information om hur Tandem Mobi-systemet fungerar, vänligen se bruksanvisningen.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care, Tandem logotyper, och Tandem Mobi är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care, Inc. i USA och/eller andra länder. SE-2442-260424