



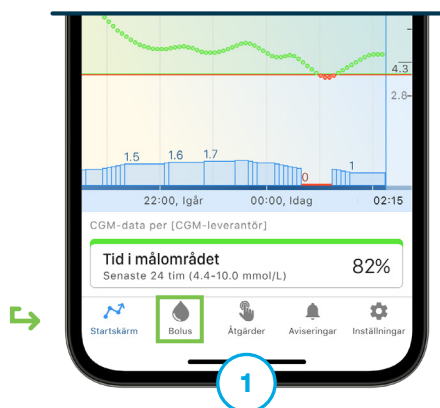


Tryck på **Bolus** i navigeringsfältet.




Om blodglukosvärdet (BG) ligger över målvärdet kommer förslag om att lägga till en korrektionsbolus visas. Tryck på **Ja** eller **Nej**.

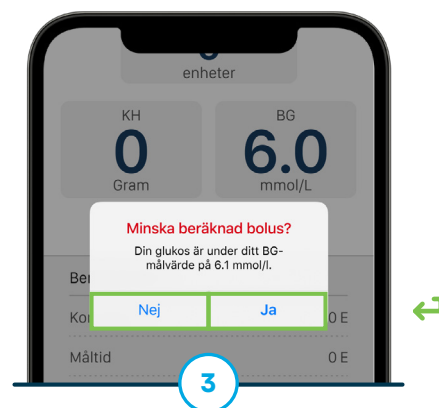

Om värdet ligger under målvärdet men över 3,9 mmol/l kommer förslag om att minska beräknad bolus visas. Tryck på **Ja** eller **Nej**.

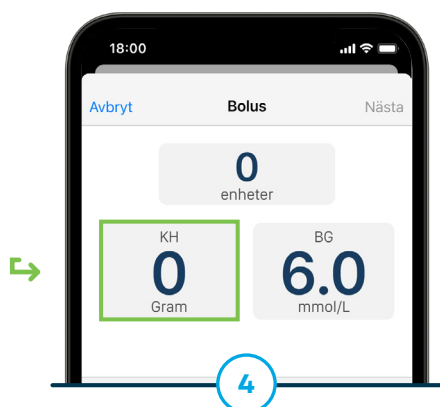


Tryck på **0 gram** för att mata in mängden kolhydrater.

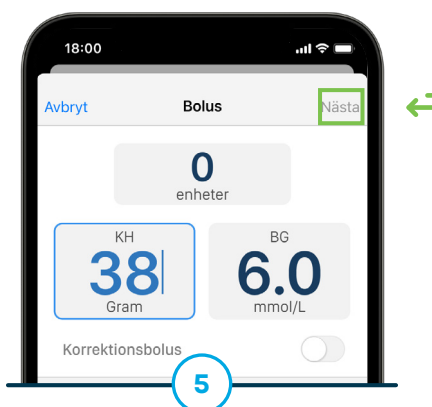


Tryck på **Nästa** för att spara.


Gå vidare till nästa sida för att **dosera en förlängd bolus** vid måltider med högt innehåll av fett och/eller protein (t.ex. pizza), vid långsam matsmältning eller vid långvarigt småätande (t.ex. fest).

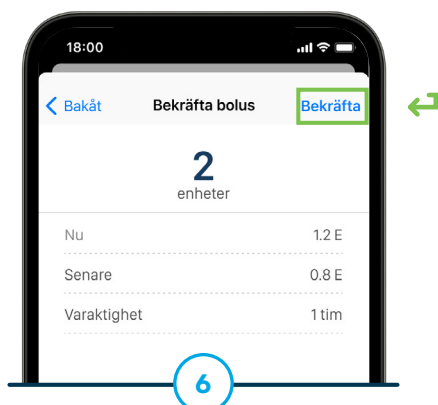

Tryck på **Bekräfta**.

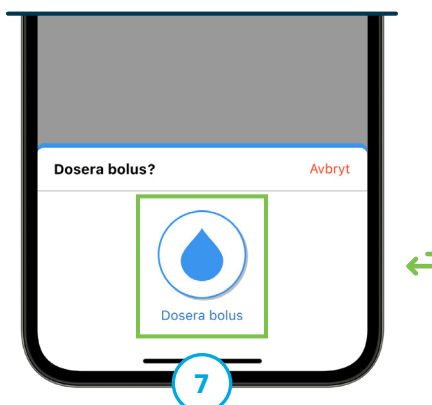

Tryck på droppsymbolen för att dosera bolus.


■ **Obs!** En säkerhetsfunktion, såsom Face ID eller kod, krävs innan bolusdoseringen påbörjas.




För att avbryta en pågående bolus, tryck  i navigeringsfältet och därefter på **Ja** för att bekräfta.




Slå på reglaget.

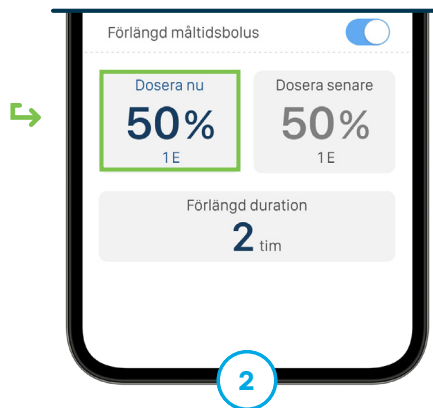


Använd standardinställningarna eller tryck på **Dosera nu-procenten** för att uppdatera.

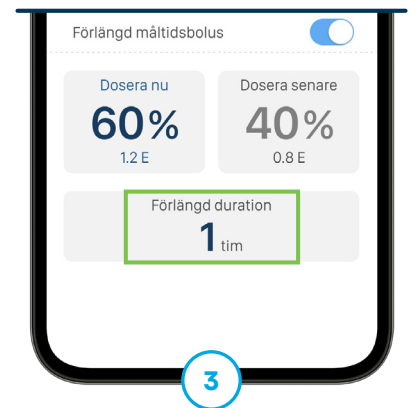


Om du vill ändra längden på tiden, tryck på **2 tim** och ändra.

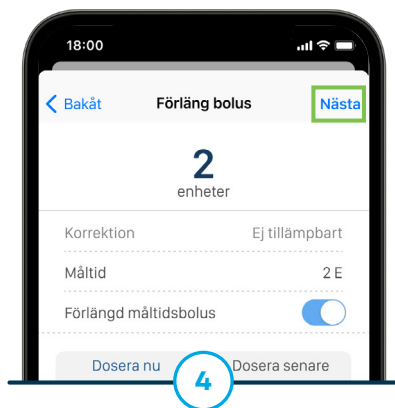

Tryck på **Nästa** för att spara värdena.

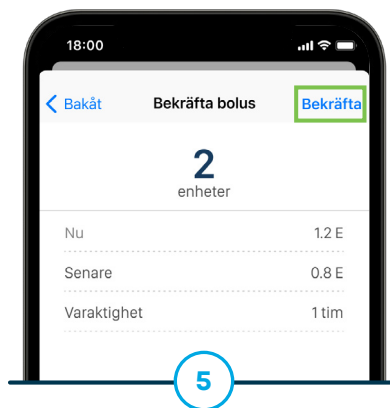

Tryck på **Bekräfta**.

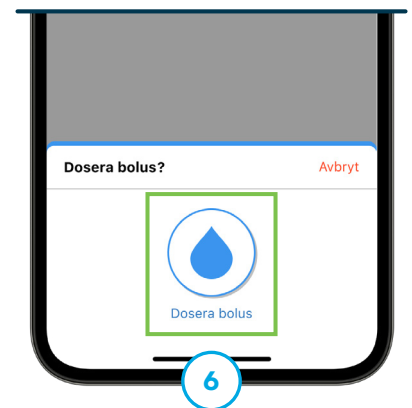

Tryck på droppsymbolen för att dosera bolus.

Observera: En säkerhetsfunktion, såsom Face ID eller kod, krävs innan bolusdoseringen påbörjas.

Dessa instruktioner tillhandahålls som ett referensverktyg för pumpanvändare och vårdgivare som redan är bekanta med användningen av en insulinpump och insulinbehandling i allmänhet. Alla skärmar visas inte. För mer detaljerad information om hur Tandem Mobi-systemet fungerar, vänligen se bruksanvisningen.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care, Tandem logotyper, och Tandem Mobi och Control-IQ+ är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care, Inc. i USA och/eller andra länder. SE-2443-260223