




För att programmera insulinpumpen Tandem Mobi måste den först parkopplas med mobilappen Tandem Mobi. Se till att pumpen är påslagen, i närheten och inte redan ansluten till en annan smarttelefon.*



► **Observera:** Dessa instruktioner tillhandahålls som ett referensverktyg för pumpanvändare och vårdgivare som redan är bekanta med användningen av en insulinpump och insulinbehandling i allmänhet. Alla skärmar visas inte. För mer detaljerad information om hur Tandem Mobi-systemet fungerar, vänligen se bruksanvisningen.

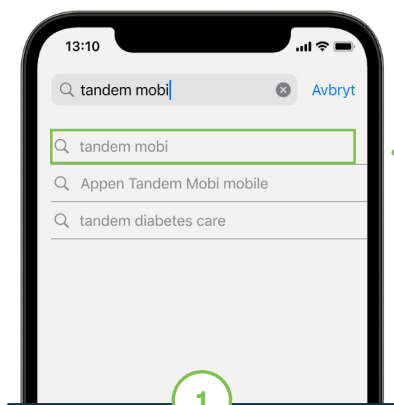

1

Gå in i App Store på användarens smarttelefon, sök efter "Tandem Mobi" och installera mobilappen Tandem Mobi.



2

Öppna mobilappen Tandem Mobi och logga in med befintliga uppgifter eller skapa ett nytt konto i Tandem Source.



3


Placera pumpen på laddningsplattan och tryck på **Börja** i mobilappen.

► **Observera:** Kontrollera att pumpen är på genom att trycka på Pumpknappen och se om pumpens statuslampor tänds.



4

Om Bluetooth® är avstängt kommer mobilappen att ge instruktioner för att slå på det. Hoppa till nästa steg om Bluetooth redan är aktiverat.

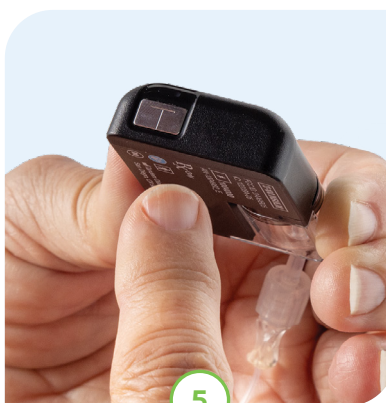

5

Plocka upp pumpen och tryck på Pumpknappen två gånger.

► **Observera:** Om detta inte utförs inom 120 sekunder visas ett meddelande om pump timeout.



6

Ange den sexsiffriga PIN-koden som finns nära QR-koden under reservoaren och tryck sedan på **Klar**.

► **Observera:** Koppla ALLTID bort infusionssetet innan reservoaren tas bort.



Tryck på **Parkoppla med pump** och sedan på **Parkoppla**. När meddelandet Pumpen är parkopplad visas, tryck på **Nästa**.



För att synkronisera pumpens tid och datum med de aktuella iOS-inställningarna, tryck på **Inställd till nu** och sedan på **Spara**.



Tryck på **Synkronisera pumpdata**. Startskärmen i mobilappen visas.

Inställningar i smarttelefonen

För att säkerställa att mobilappen Tandem Mobi fungerar korrekt, aktivera eller inaktivera följande inställningar på smarttelefonen:



Inaktivera zoomläge när du använder mobilappen Tandem Mobi. Detta finns under smarttelefonens Hjälpmedelsinställningar.



Inaktivera automatiska uppdateringar så att användaren kan kontrollera att appen är kompatibel med den nya iOS-versionen innan uppdateringen utförs manuellt.




Aktivera smarttelefonens säkerhetsfunktion (t.ex. skärmlås, lösenkod, ansiktsgenkänning) innan insulindoseringen justeras och pumpen programmeras.



Aktivera aviseringar, inaktivera energisparläge och tillåt alla behörighetsförfrågningar för att ta emot pumpvarningar, larm och påminnelser.



Efter att dessa säkerhetsinställningar och telefoninställningar har genomförts, **gå tillbaka** och fortsätt med Steg 1.

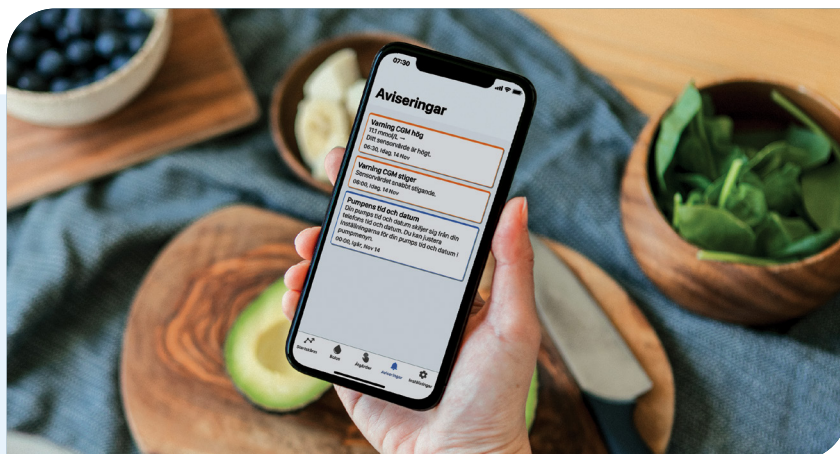

Tips och felsökning

Detta avsnitt ger användbara tips och instruktioner för att åtgärda eventuella problem som användaren kan uppleva vid användning av mobilappen.



Användarkonto

Om användaren redan har ett konto i Tandem Source, logga in med den befintliga e-postadressen och lösenordet. Nya användare kan skapa antingen ett Förälder/Vårdnadshavare- eller Personligt konto.



Håll appen öppen

Mobilappen måste köras i bakgrunden för att kunna ta emot och skicka data till och från Tandem Mobi insulinpump och för att säkerställa att användaren kan ta emot aviseringar.



Skydda lösenordet

Dela aldrig säkerhetslösenordet eller ge någon annan behörighet att använda smarttelefonen med sina biometriska uppgifter, för att undvika oavsiktliga ändringar i insulindoseringen.



Hitta pumpen

Om pumpen har försvunnit kan mobilappen användas för att skicka en signal via skärmen Parkopplad pump. Signalen får insulinpumpen att pipa och vibrera tre gånger.



Skadad telefon

Avbryt användningen av appen om smarttelefonen eller en större del av skärmen är skadad. Tills enheten kan ersättas, använd en alternativ plan för insulindosering.

Ilan



diagnostiserad 2013



Ta bort parkopplingen med telefonen




Om insulinpumpen Tandem Mobi byts ut eller om användaren upplever återkommande problem med appen, följ dessa instruktioner för att **ta bort parkopplingen mellan pumpen och appen** innan den parkopplas igen.

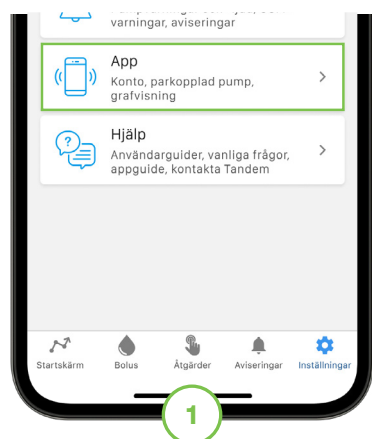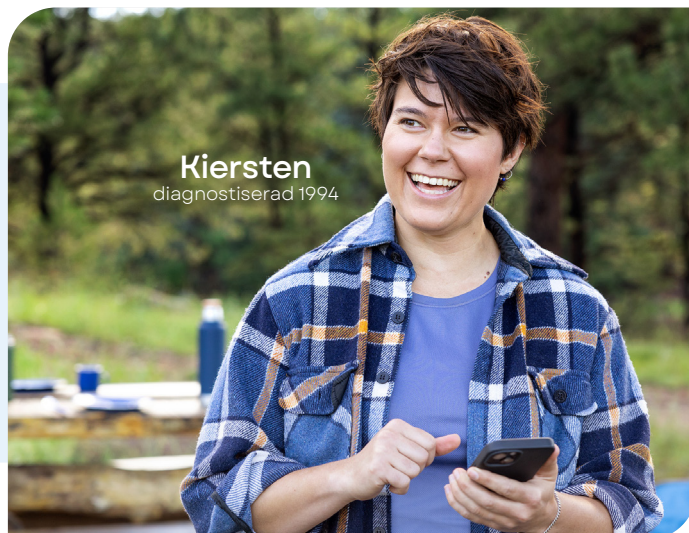

Tryck på **Inställningar** i navigeringsfältet och sedan på **App**.

► **Observera:** Pumpvarningar, larm, påminnelser och felmeddelanden kommer att visas via statuslampor på pumpen även när den är fränkopplad från smarttelefonen.

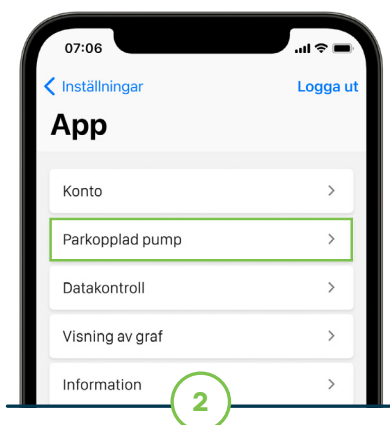

Tryck på **Parkopplad pump**.



Tryck på **Parkoppl avbr.** Bekräftelsemeddelande kommer att visas.

► **Observera:** Använd stegen i början av denna guide för att upprepa parkopplingsprocessen eller parkoppla en ny enhet.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care, Tandem logotyper, och Tandem Mobi är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care, Inc. i USA och/eller andra länder. Bluetooth®-märket och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av detta märke av Tandem Diabetes Care, Inc. är under licens. Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. Alla andra varumärken från tredje part tillhör deras respektive ägare. SE-2444-260223