




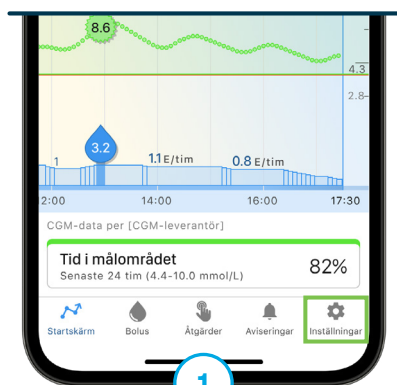


Tryck på **Inställningar** i navigeringsfältet och därefter på **Pump**.

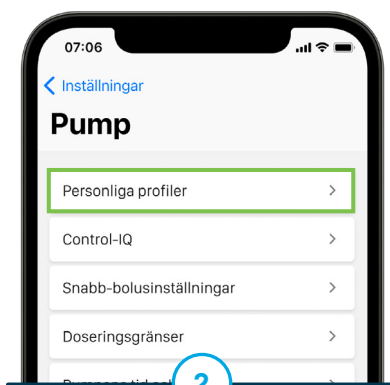


Tryck på **Personliga profiler**.

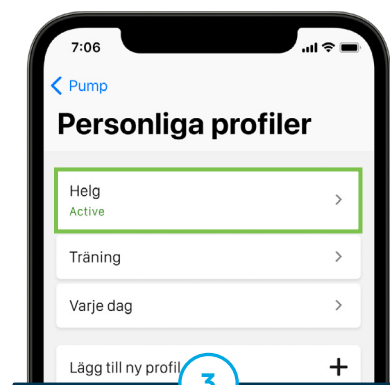


Tryck på namnet på den personliga profil som du vill redigera.

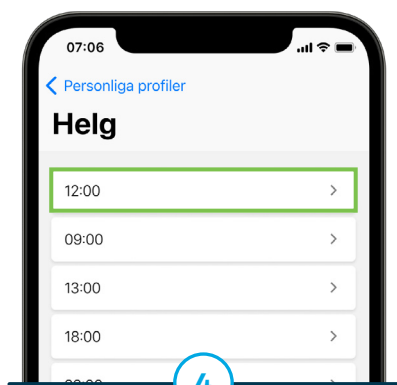


Tryck på det önskade tidssegmentet för att redigera.

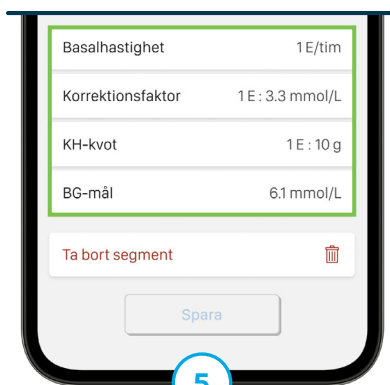

Tryck på den inställning som du vill redigera.

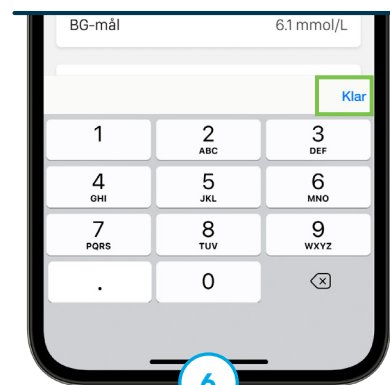

Använd knappsatsen för att ange det nya värdet och tryck sedan på **Klar**.

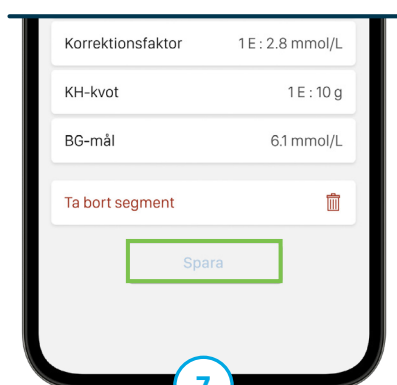

Tryck på **Spara**.




Tryck på andra segment för att göra ändringar eller återgå till startskärmen.



Den personliga profilen kan aktiveras, dupliceras, raderas och/eller döpas om via menyn **Profilval**.



En temporär basaldosering (Tempbasal) används för att tillfälligt öka eller minska basaldosen i din aktuella personliga profil under en begränsad tid.

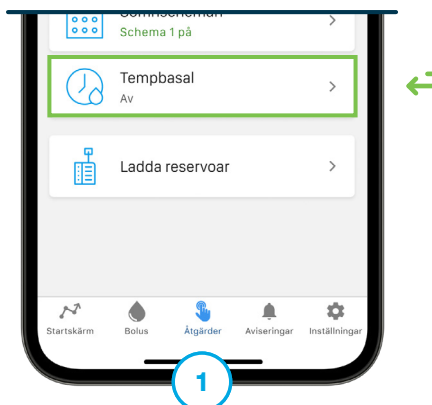


Tryck på **Åtgärder** i navigeringsfältet och sedan på **Tempbasal**.




Tryck på **Tempbasal** och ange önskad procentandel.



Tryck på **Varaktighet** och ange önskad tidslängd. Tryck på **Starta** för att börja.

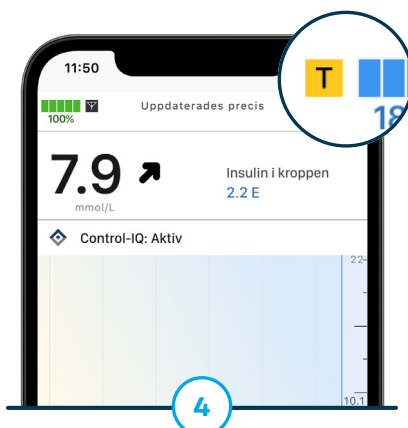

När Tempbasal är aktiv visas en gul ikon på startskärmen.

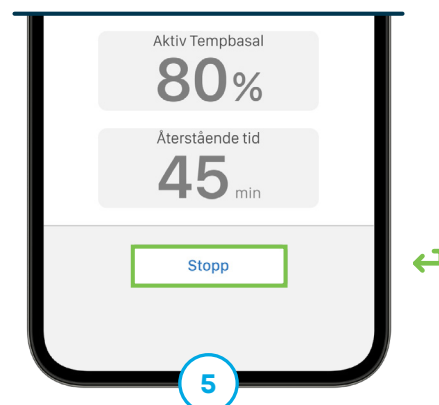

För att avbryta när som helst, tryck på **Stopp** på skärmen **Tempbasal** och sedan på **Ja** för att bekräfta.



Control-IQ+ teknologin kommer att fortsätta justera basaldoseringen efter behov baserat på sensorns glukosvärden.

Dessa instruktioner tillhandahålls som ett referensverktyg för pumpanvändare och vårdgivare som redan är bekanta med användningen av en insulinpump och insulinbehandling i allmänhet. Alla skärmar visas inte. För mer detaljerad information om hur Tandem Mobi-systemet fungerar, vänligen se bruksanvisningen.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care, Tandem logotyper, Tandem Mobi och Control-IQ+ är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care, Inc. i USA och/eller andra länder. SE-2445-260223