



Här är några steg att följa om sensorn för kontinuerlig glukosmätning (CGM)*, insulinpumpen Tandem Mobi eller mobilappen Tandem Mobi inte kan kommunicera med varandra. Om sensorn blir frångkopplad från pumpen kommer varningen **Utom räckvidd** att visas på mobilappen.

För att återansluta, flytta pumpen närmare sensorn och se till att pumpen och sensorn är på samma sida av användarens kropp och inom synhåll för varandra.

■ **Observera:** Tills sensorn kan återanslutas bör användare använda en blodsockermätare och teststickor för att fatta behandlingsbeslut.


■ **Observera:** Dessa instruktioner ges som ett referensverktyg för pumpanvändare och vårdgivare som redan är bekanta med användning av insulinpump och insulinbehandling i allmänhet. Alla skärmbilder visas inte. För mer detaljerad information om användning av Tandem Mobi systemet, vänligen se dess bruksanvisning.



Om sensorn tappar kontakten med pumpen kommer "CGM är utom räckvidd för pumpen" att visas i mobilappen.


För att återansluta, flytta pumpen närmare sensorn och se till att pumpen och sensorn är på samma sida av användarens kropp och inom synhåll för varandra.

■ **Observera:** Tills sensorn kan återanslutas bör användaren använda en blodsockermätare och teststickor för att fatta behandlingsbeslut.

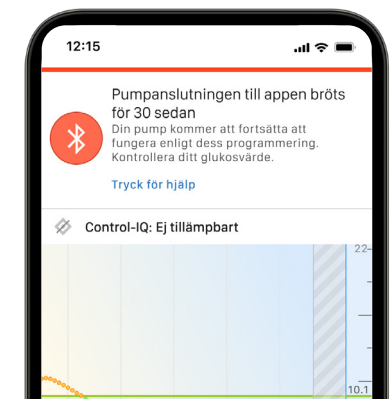

Om pumpen kopplas bort från mobilappen kommer en notisbanner att visas i appen.

För att återansluta, se till att **Bluetooth®** fortfarande är aktiverat och att pumpen och smarttelefonen är inom 1,5 meter från varandra.

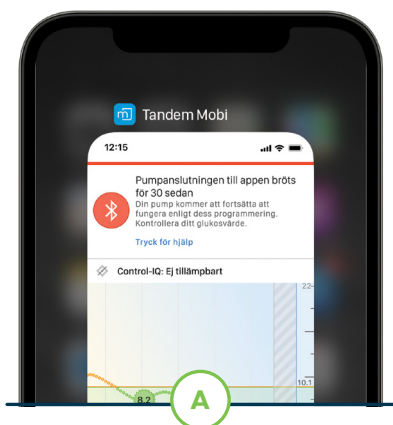

Om anslutningen inte återställs inom fem minuter, stäng eller tvinga stopp av mobilappen och öppna den sedan igen.



OBS: Om anslutningen fortfarande inte återställs, stäng av och slå på **Bluetooth®** igen. Om problemen kvarstår, välj **Tryck för Hjälp** på bannern.

Vad händer vid förlorad anslutning?

Insulindosering

- ✓ Pumpen kommer att fortsätta leverera basaldosering enligt inställningarna i den Personliga profilen. Om en Tillfällig basaldosering (Tempbasal) var programmerad kommer den att fortsätta enligt tidsinställningen.
- ✓ Bolusdos kan begäras via snabbolus-knappen på pumpen, om den har aktiverats i mobilappen. Eventuell aktiv bolus som programmerats innan anslutningen tappades kommer att fortsätta doseras.
- ✓ Pumpen kommer att fortsätta ta emot CGM-värden, och om Control-IQ+ teknologin är aktiverad justerar pumpen insulindoseringen automatiskt.
- ✓ **För att stoppa insulindosering, koppla bort slangen från infusionsstället.**

Pumpens statuslampor


- ✓ Pumpen kommer fortsatt att visa aviseringar om larm, varningar och pumpstatus via statuslamporna.
- ✓ Larm stoppar insulindoseringen. För att återuppta insulindoseringen måste anslutningen återställas.
- ✓ Varningar och larm kan inte bekräftas i pumpen. Om Snooze-funktionen är aktiverad kan användaren tysta dem under en viss tid genom att snabbt trycka och släppa Pumpknappen tre gånger.

Mobilappens skärm

- ✓ Viss pumpinformation kanske inte längre visas i mobilappen (t.ex. batteri- eller insulinnivåer, insulin i kroppen, pumphistorik).
- ✓ Eftersom data inte kan visas i appen vid förlorad anslutning kommer ett grått skuggat område att visas i CGM-trendgrafen.



Pumptips: Pumpen accepterar endast kommunikation från en känd, kopplad enhet, såsom en kompatibel CGM-sensor eller din personliga smartphone. Varje enhet måste parkopplas med pumpen. Pumpens trådlösa kommunikation är skyddad med kryptering och autentisering.

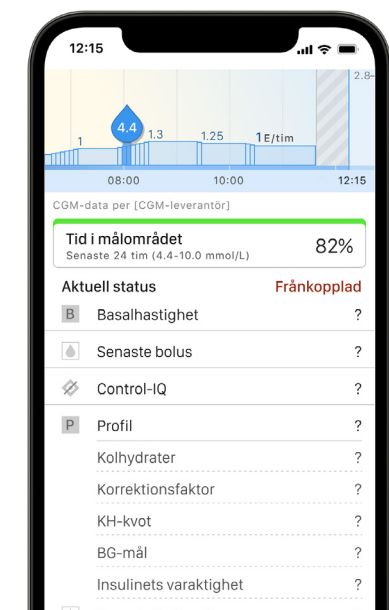

*CGM säljs separat.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care, Tandem logotyper, Tandem Mobi, Control-IQ och Control-IQ+ är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care, Inc. i USA och/eller andra länder. Bluetooth®-märket och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av detta märke av Tandem Diabetes Care, Inc. är under licens. SE-2446-260407