





Control-IQ+ är utformad för att hjälpa till att öka tid i målområdet (3,9–10,0 mmol/l). Den här guiden beskriver hur du aktiverar Control-IQ+ teknologi och hur algoritmen fungerar.

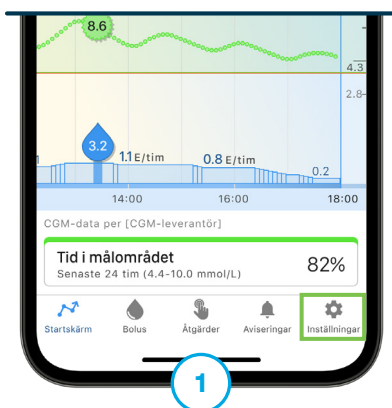


Tryck på **Inställningar** i navigeringsfältet.




Tryck på **Pump**. Använd telefonens säkerhetsfunktion för att verifiera identiteten.

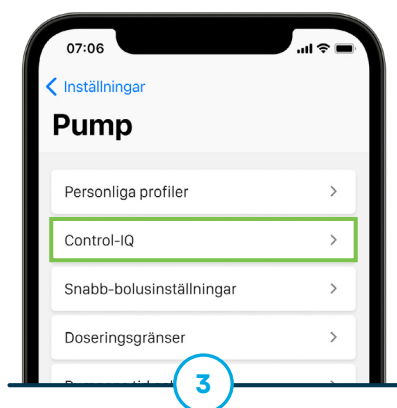

Tryck på **Control-IQ**.

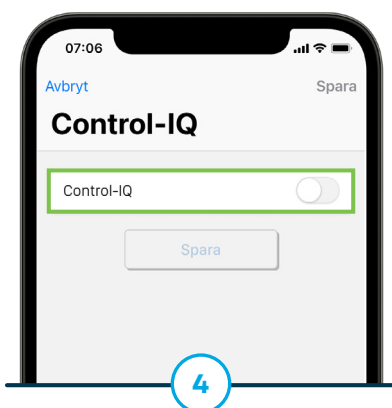


Slå på Control-IQ.

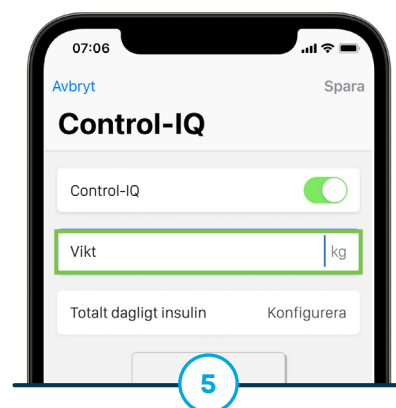


Tryck på **Vikt**, använd knappsetsen för att ange värdet och tryck på **Klar**.



Tryck på **Totalt dagligt insulin**, använd knappsetsen för att ange värdet och tryck på **Klar**.

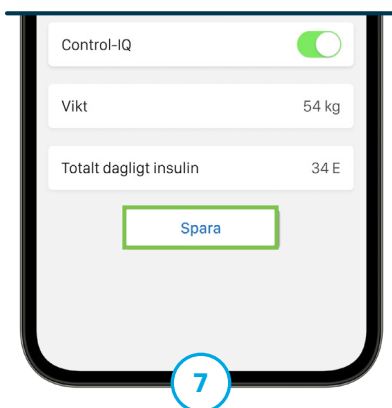


Tryck på **Spara** för att bekräfta.

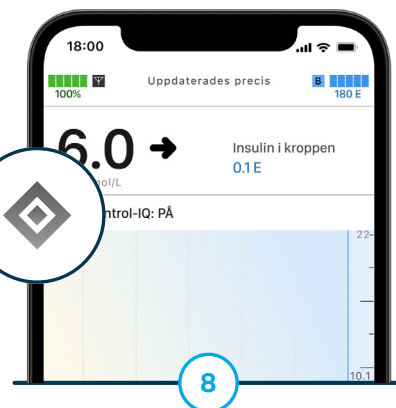


En statusikon visas på startskärmen när Control-IQ+ är aktiverat.

Aktivitetsprofil Sömn


Aktivitetsprofil Sömn
Tandem Mobi system kan automatiskt växla till ett förprogrammerat sömnchema. Det finns möjlighet att programmera två olika sömnsheman.

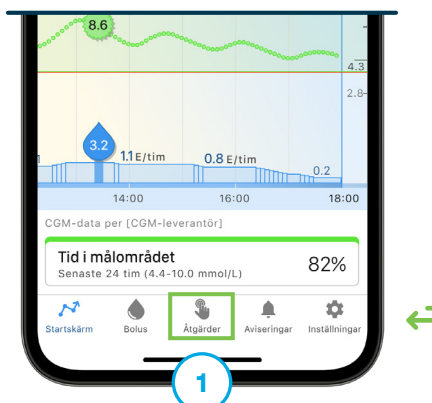

Tryck på **Åtgärder** i navigeringsfältet och därefter på **Sömnsheman**.

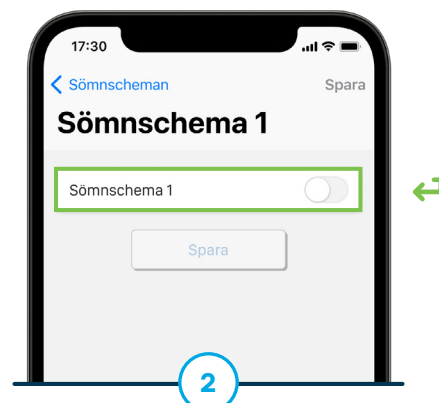


Tryck på ett sömnsheman för att redigera och aktivera sedan reglaget.

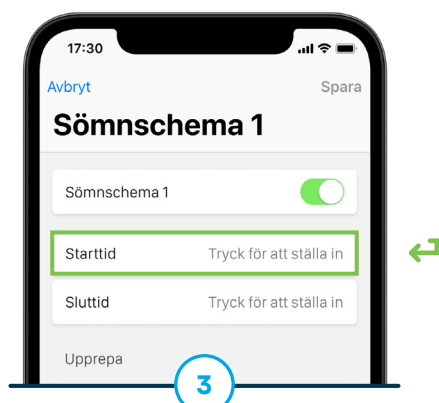

Tryck på **Starttid** och välj önskad tid. Tryck på **Klar** för att fortsätta.




Upprepa samma process för att ställa in **Sluttid**.

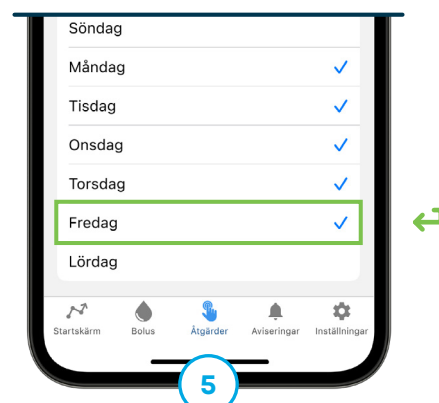

Tryck på varje veckodag där sömnshemat ska gälla. Tryck på **Spara** för att fortsätta.

Manuell aktivering
Man kan även slå på och av Aktivetsprofil Sömn manuellt om man önskar.

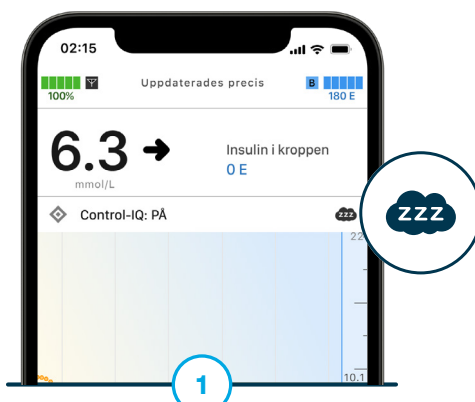

När Aktivetsprofil Sömn är aktiverat visas en ikon på **Startskärmen**.




Tryck på **Åtgärder** i navigeringsfältet och aktivera reglaget vid Sömn för att stänga av eller sätta på Aktivetsprofil Sömn.

Aktivitetsprofil Träning

Aktivitetsprofil Träning


kan programmeras för att ta hänsyn till den naturliga sänkningen av glukosnivån som kan uppstå i samband med ökad aktivitet.

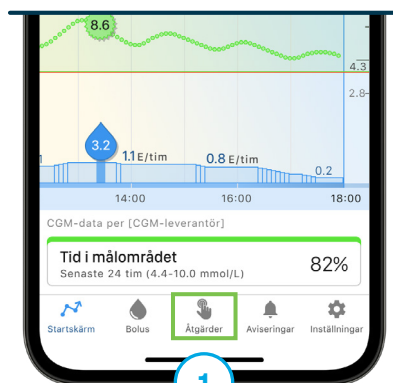

Tryck på **Åtgärder** i navigeringsfältet.



Aktivera reglaget vid **Träning** för att starta aktivitetsprofil Träning.

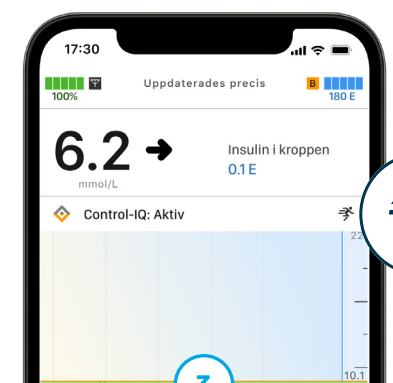

När funktionen är aktiverad visas en ikon på startskärmen.



För att stänga av funktionen trycker du på **Åtgärder** i navigeringsfältet och sedan på reglaget igen.



Hur det fungerar

Control-IQ+ teknologi använder sensorvärden från en kontinuerlig glukosmätare (CGM)* för att förutse glukosnivåer 30 minuter framåt och justerar automatiskt insulintillförseln om glukosnivåerna förväntas vara under eller över ett förinställt behandlingsvärde.

Control-IQ+ behandlingsvärden

			
  Doserar	AutoBolus [†]		
	10.0	10.0	x
 B Ökar	Basaldosering		
	8.9	8.9	6.7
 Bibehåller	Programmerad basaldosering		
	6.25	7.8	6.25
 B Minskar	Basaldosering		
	3.9	4.4	3.9
 0 Pausar	Basaldosering		

När de valfria Aktivitetsprofilerna Sömn eller Träning är aktiverade används ett snävare intervall mellan behandlingsvärdena för att ytterligare skydda mot låga värden under träning och höga värden under sömn.

* CGM säljs separat. † Om glukosvärdena förutses stiga över 10,0 mmol/l om 30 minuter beräknar Control-IQ+ teknologi en korrektionsbolus med hjälp av inställningarna i Personliga profiler och ett målvärde på 6,1 mmol/l och levererar sedan 60 % av det beräknade värdet.

Dessa instruktioner tillhandahålls som ett referensverktyg för pumpanvändare och vårdgivare som redan är bekanta med användningen av en insulinpump och insulinbehandling i allmänhet. Alla skärmar visas inte. För mer detaljerad information om hur Tandem Mobi-systemet fungerar, vänligen se bruksanvisningen.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care, Tandem logotyper, Control-IQ, Control-IQ+ och t:slim X2 är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken från tredje part tillhör deras respektive ägare. SE-2463-260424