



Tandem Mobi System

Snabbguide



Innehåll

- Använda pumpknappen
- Pumpens statuslampor
- Förstå färgkodningen
- Pumpstatus och åtgärder
- Varningar och larm
- Ge en snabbolus
- Ladda pumpen
- Pumpens batterinivå

Använda pumpknappen

- ✓ **Pausa (snooza) varningar och larm:** Tryck snabbt på pumpknappen tre gånger i följd (snooze-funktionen måste vara aktiverad).
- ✓ **Kontrollera pumpstatus:** Tryck snabbt på knappen en gång och sedan släpp (en kort fördröjning innan statuslamporna tänds är normalt).
- ✓ **Snabbolus:** Håll pumpknappen intryckt tills du hör två pip eller känner vibrationer (om aktiverat). Se avsnittet **Ge en snabbolus** för mer information.

■ **Obs:** Pumpknappen används för fler funktioner än de som listas här. Se bruksanvisningen för mer information.

Pumpens statuslampor

Ovanför pumpknappen sitter två lampor – pumpens statuslampor. De använder olika färger och blinkmönster för att visa pumpens status.

För att kontrollera status:
Tryck en gång på pumpknappen.
Lamporna tänds och visar pumpens status.



Pumpknapp

Förstå färgkodningen

Statuslamporna använder olika färger för att indikera status:



Grön:

Basaldosering (standard eller tempbasal)



Blå:

Bolus levereras eller slang fylls vid byte av reservoar



Vit:

Pumpen laddas eller insulintillförseln är manuellt stoppad



Gul:

Varning eller påminnelse – kontrollera Tandem Mobi-appen



Röd:

Larm eller funktionsfel – all insulintillförsel har stoppats

⚠ **Varning:** Larm eller funktionsfel kräver omedelbar åtgärd. Kontrollera ditt blodsocker om du inte har tillgång till din smartphone.

Pumpstatus och åtgärder

Följande ljusmönster visas när du kontrollerar status eller startar insulintillförsel:



Basaldosering:

Lamporna lyser växelvis och pulserar grönt



Temporär basaldosering:

En lampa lyser fast grönt, den andra pulserar grönt



Bolus:

Lamporna lyser växelvis och pulserar blått




Förlängd bolus:

En lampa lyser fast blått, den andra pulserar blått

Varningar och larm

Pumpen kommunicerar via blinkmönster:

⚠ Varning: Kontrollera ditt blodsocker om du inte kan läsa avdiveringar om varningar, larm eller funktionsfel på din smartphone.

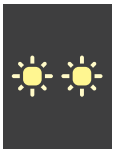

Påminnelse:

Båda lamporna blinkar gult en gång




All insulintillförsel stoppad manuellt:

Båda lamporna blinkar vitt tre gånger



Funktionsfel eller larm: ⚠

Båda lamporna blinkar rött tre gånger

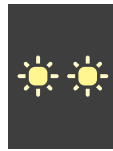

Pump- eller CGM-varning: ⚠

Båda lamporna blinkar gult två gånger

Ge en snabbolus

Läs alla steg innan du börjar:



Håll pumpknappen intryckt



Lyssna efter två pip eller känn vibrationer



Tryck på knappen för varje steg tills önskad mängd uppnås (pumpen piper/vibrerar för varje tryck)




Vänta på bekräftelse (pip/vibration) för vald mängd



Håll knappen intryckt igen tills bekräftelse ges och bolusen levereras

Ladda pumpen

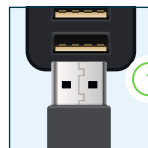

Se till att laddningsplattan är ansluten till ström via USB-kabeln



Placera pumpen på laddningsytan



Säkerställ att laddningsplattan lyser när pumpen har placerats på laddningsplattan

Pumpens batterinivå

För att kontrollera batterinivån utan appen **måste** pumpen placeras på laddningsplattan.

Statuslamporna visar då batterinivån.



Ljus på laddningsplattan



Obs: När pumpen placeras på laddningsplattan lyser LED-ringen i 30 sekunder och dimmas sedan.

Batterinivåer

För att se batterinivån på pumpen **MÅSTE** pumpen vara placerad på laddningsplattan.



Under 50 %

En lampa pulserar vitt



Över 50 %

En lampa lyser fast vitt, en pulserar vitt



Ingen eller mycket låg laddning

Ingen lampa lyser, alternativt en lampa pulserar rött



Fulladdad

Båda lamporna dimmas



Slutnot: Läs bruksanvisningen för mer information.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alla rättigheter förbehållna. SE-2541-260603