

Fem enkle regler og symboler i Tandem t:slim X2™ insulinpumpe med Control-IQ-teknologi

			Control-IQ™	Søvn	Motion
	Doserer	Automatisk korrektionsbolus , hvis sensorværdien forudses at være 10,0 mmol/l eller derover om 30 min (ikke Søvnprofilen)	≥10,0	--	≥10,0
	B Øger	Basaldoseringen øges , hvis sensorværdien forudses at være 8,9 mmol/l eller derover om 30 min	≥8,9	≥6,7	≥8,9
	B Bevarer	Anvender programmeret personlig basaldosering	6,25-8,9	6,25-6,7	7,8-8,9
	B Reducerer	Basaldoseringen reduceres , hvis sensorværdien forudses at være 6,25 mmol/l eller derunder om 30 min	≤6,25	≤6,25	≤7,8
	0 Pauserer	Pauserer basaldoseringen , hvis sensorværdien forudses at være 3,9 mmol/l eller derunder om 30 min	≤3,9	≤3,9	≤4,4

Behandlingsværdierne i teksten henviser til Control-IQ og værdierne i tabellen gælder for aktiveret Søvn- og Motionsprofil

Statusikoner i pumpen ved Control-IQ

Symbol	Betydning
	Control-IQ™-teknologi er aktiveret, men øger eller reducerer ikke aktivt basaldoseringen
	Control-IQ-teknologi øger basaldoseringen
	Control-IQ-teknologi reducerer basaldoseringen
	Control-IQ-teknologi har pauseret basaldoseringen
	Control-IQ-teknologi doserer en automatisk korrektionsbolus
	Søvnprofilen er aktiveret

Symbol	Betydning
	Basaldosis er programmeret og doseres
	Control-IQ-teknologi øger basaldoseringen
	Control-IQ-teknologi reducerer basaldoseringen
	Basaldoseringen er pauseret, og en basaldosis på 0 E/time er aktiv
	Control-IQ-teknologi doserer en automatisk korrektionsbolus
	Motionsprofilen er aktiveret

ADVARSEL: Control-IQ-teknologien må ikke anvendes af personer under 6 år. Den må heller ikke anvendes til patienter, som bruger mindre end 10 enheder insulin pr. døgn, eller som vejer mindre end 25 kg. Yderligere vigtig sikkerhedsinformation findes på www.tandemdiabetes.com/safetyinfo